



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

**PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
AÑO 2022**



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE
SAN JOSÉ - CALDAS E.S.E**

“NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR”



CONTENIDO

1. Introducción
2. Información General
3. Plataforma Estratégica
4. Definición Mantenimiento Hospitalario
5. Objetivos del Mantenimiento Hospitalario
6. Objetivos del Plan de Mantenimiento
7. Plan de Mantenimiento
8. Formato para la verificación de los diferentes aspectos del mantenimiento
9. Recursos y presupuesto del mantenimiento hospitalario



1. INTRODUCCIÓN

El Hospital Departamental San José de San José de Caldas elaboró para el año 2022 el plan anual de mantenimiento hospitalario el cual describe los objetivos y metas propuestas para el presente año. En él se especifica cuáles son los equipos de dotación, biomédico, muebles para uso administrativo y asistencial, equipos de comunicación e informática y de infraestructura que son objeto de mantenimiento correctivo y preventivo para el funcionamiento correcto de los diferentes servicios de la institución, prestando un servicio con calidad y seguridad.

En el presente informe se especifica además los recursos financieros de conformidad con el artículo 9 del Decreto 1769 de 1994, para el año en curso, el cual tiene una asignación del 5% de los recursos.

El plan anual de mantenimiento es elaborado por el Jefe de mantenimiento y el director de la institución en compañía y asesoría de la oficina de Control Interno, el cual ha sido aprobado y socializado con el personal de salud.



2. INFORMACIÓN GENERAL:

- Nombre: Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE
- Dirección: Carrera 2ª N° 5-14
- Teléfono: 3116302529-3113165515
- Correo Electrónico: hosajo5@gmail.com
- Representante Legal: Cristian Camilo Gallego Aguirre
- Inicio de Actividades: 01 de mayo de 2020
- Naturaleza Jurídica: Pública
- Habilitación de todos los servicios de baja complejidad y algunos de mediana complejidad.
- Segundo Hospital del Departamento acreditado por la UNICEF como Institución IAMI: Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia.

2.1 Historia del hospital:

El primer centro asistencial de que se tenga conocimiento funcionó al frente de la actual Alcaldía con una enfermera y un médico que venían de la vecina localidad de Belalcazar cada ocho días y cuyos medicamentos se limitaban más a las bebidas naturales y pócimas que el mismo preparaba.

En el año de 1956 se construyó la primera etapa como puesto de socorro, que más tarde se denominó centro de salud hasta el año de 1998. El sitio donde está asentado el Hospital era un barranco de gran altura, predio que pertenecía al corregimiento y donde cuentan que a principios del siglo pasado existió un cementerio y que más tarde funcionó por algún tiempo la escuela urbana de niños. Esta construcción se logró con aportes así:

Comité de cafeteros:	50%
Secretaría de Salud Departamental:	25%
Corregimiento:	25%

La inauguración de esta obra estuvo a cargo del Gobernador del Departamento de dicha época el Coronel Gustavo Sierra Ochoa.

A partir del 8 de septiembre de 1998 y de acuerdo a las gestiones del entonces Director Dr. Jairo Franco Londoño, el centro de salud se convirtió en Hospital Departamental de primer nivel de atención.



3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

“Somos un Hospital Departamental que ofrece servicios de baja complejidad alineados con políticas nacionales y departamentales, comprometidos con la seguridad del paciente, encaminados en procesos de acreditación y administrando los recursos para lograr un equilibrio suficiente que nos lleve a brindar un servicio integral en salud, con calidad técnico-científica para los habitantes del Municipio de San José de Caldas”.

VISIÓN

“Proyectamos la ESE Hospital Departamental San José De San José Caldas, como una entidad integrada y auto sostenible, para prestar los servicios de primer nivel contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en todas las etapas del ciclo vital, garantizando cobertura, equidad, accesibilidad y adaptabilidad de los servicios a las necesidades específicas del usuario, familia y comunidad enfocados en la realización de los procesos necesarios para alcanzar los estándares de acreditación.”

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

- **JUSTICIA:** Disposición para actuar con equidad y probidad en relación con las personas, los procesos y las decisiones.
- **SOLIDARIDAD:** Entender y cooperar con los requerimientos y necesidades de la población en general.
- **HONESTIDAD:** El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y recato, tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la empresa y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en general.



- **PARTICIPACION:** Cada funcionario, será protagonista activo de los procesos de trabajo, orientados al beneficio de la comunidad.
- **SERVICIO:** Prestación y aplicación humana del trabajo que satisface necesidades a personas, comunidades y organizaciones.
- **MEJORAMIENTO CONTINUO:** La entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad.
- **OPORTUNIDAD:** Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación del servicio a los usuarios.
- **EFICACIA:** Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los resultados esperados.
- **EFICIENCIA:** Mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a los cuales da derecho la seguridad social sean prestados en forma, adecuada, oportuna y suficiente.

VALORES ETICOS

- **CALIDAD HUMANA:** Atención solidaria, tolerante, responsable y paciente, con personal calificado e idóneo para su labor.
- **CALIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA:** Atención integral al usuario, aplicando una adecuada utilización de los recursos, desde un sistema de control interno para la garantía de la calidad y satisfacción del usuario y su familia.
- **EQUIDAD:** Atención sin discriminación de raza, sexo, religión, cultura, estrato o movimiento político.
- **TRABAJO EN EQUIPO:** Servidores del hospital siempre trabajando en conjunto por el bienestar de los usuarios y la comunidad.



4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- **CONSULTA EXTERNA INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIA:** (Medicina General, Odontología, psicología,)
- **URGENCIAS** (Las 24 horas)
- **HOSPITALIZACION** (Las 24 Horas).
- **PEQUEÑA CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS** (Las 24 Horas).
- **AYUDAS DIAGNOSTICAS** (Laboratorio Clínico I Nivel, Electrocardiograma, Rayos X)
- **SANEAMIENTO AMBIENTAL** (educación en tenencia responsable de mascotas, calidad del agua y vacunación antirrábica caninos y felinos)
- **PROGRAMAS COMUNITARIOS**
 - * Promoción y Prevención:
 - Vacunación
 - Atención a través de servicios extramurales
 - Detección de alteraciones de: crecimiento y desarrollo, joven, adulto mayor, agudeza visual, embarazo, cáncer de seno y cervico-uterino
 - Atención: Planificación familiar, recién nacido, puerperio, parto
 - Atención primaria social (APS)
 - * Plan de Intervenciones colectivas:
 - Programa Ampliado de Inmunizaciones
 - Salud Pública
 - Salud Sexual Reproductiva
 - Prevención y control de enfermedades crónicas y cardiovasculares
 - Salud Mental
 - Jornadas Saludables en área rural.
- **FARMACIA** (Incluyendo los medicamentos del POS-S Y POS.C)
- **AMBULANCIA** (Las 24 horas)
- **VALORACIÓN MÉDICO LEGAL.**



5. PERSONAL DISPONIBLE:

GERENTE	1
MEDICOS	3
COORDINACIÓN PYP	1
ODONTOLOGA GENERAL	1
BACTERIOLOGA	1
FACTURACION	2
ENFERMERA JEFE	2
AUXILIARES DE ENFERMERÍA	3
AUXILIAR DE VACUNACIÓN	1
AUXILIAR DE PE Y DT	1
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	1
REGENTE	1
PROMOTORAS DE SALUD	2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
TECNICO EN SANEAMIENTO	1
CONDUCTOR	1
JEFE DE MANTENIMIENTO	1
SERVICIOS GENERALES	2
AUXILIAR DE ESTADISTICA	1
PSICOLOGIA	1
ASESOR JURIDICO	1
ASESOR CONTABLE	1



6. INFRAESTRUCTURA:

El Hospital San José cuenta actualmente con:

1. Una Sala de Urgencias con dos (2) camillas
2. Sala de Reanimación
3. Una Sala de Partos
4. Una Sala para toma de Citologías
5. Un proceso de esterilización
6. Dos Salas de espera
7. Una Sala de reuniones
8. Una Farmacia
9. Un Almacén
10. Un Laboratorio Clínico
11. Un Equipo de RX para Odontología
12. Hospitalización Sala General mujeres con dos (2) camas
13. Hospitalización Sala General hombres dos (2) cama
14. Hospitalización Pediatría (1) cama
15. Tres Consultorios Médicos
16. Un consultorio de psicología.
17. Un Consultorio Odontológico
18. Un Consultorio de vacunación
19. Oficina Dirección
20. Oficina de Saneamiento Ambiental
21. Oficina de Archivo
22. Oficina de Estadística-SIAU
23. Oficina Administrativa
24. Oficina de Promoción y Prevención
25. Oficina de Facturación
26. Oficina de Control Interno
27. Cuarto personal médico
28. Cuarto de enfermería
29. Lavandería
30. Cocina y cafetería
31. Parqueaderos
32. Depósito de residuos Hospitalarios
33. Cuarto de depósito de gases medicinales
34. Cubículo de atención a pacientes COVID-19



7. DEFINICIÓN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo (art. 7 Decreto 1769 de 1994).

8. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO

- Garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que administra y utiliza los recursos físicos para la prestación de servicios en el Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE
- Contribuir a que la atención en salud que brinda el Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE cumpla con las características de calidad y habilitación según el Decreto 2174 de 1996 y del Decreto 1011 del 2006.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz de los recursos físicos para la prestación de servicios en salud, obteniendo así el rendimiento pleno de la inversión económica en los recursos para atención en salud, contribuyendo a la reducción de los costos de operación en la institución.

9. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

- Garantizar la asignación de recursos económicos por parte de la institución. necesarios para desarrollar las labores de mantenimiento.



- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medio para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.
- Informar a la dirección el estado de los equipos biomédicos, equipos de comunicación, equipos de informática, muebles y planta física para la toma de decisiones y planeación de la asignación de recursos.

10. PLAN DE MANTENIMIENTO

El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al departamento o servicio de mantenimiento de cada institución.

El personal encargado del mantenimiento está contratado con la Empresa AMC SUMINISTROS el cual cuenta con personal capacitado para realizar esta labor, además, la empresa ha certificado que cumple con las condiciones de capacidad tecnológica y científica para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que brinda un servicio con calidad altamente confiable. También cuenta con un certificado de registro ante el INVIMA, el cual se anexa **(ANEXO 1)**



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



Bogotá D.C.

S.I.500-1191-10

Señor:
JHON JABER HENAO ROJO
Calle 50B No. 39 - 08
Teléfono: 8750449
Marizales - Caldas

ALIENTE: DIRECCION GENERAL SALUD
Rad: 10027038 Radicado: 10027038
Folio: Clave: 62022
De: DIRECCION INSUMOS PARA LA SALUD
Para: JHON JABER HENAO ROJO
Fecha: 2010/04/21 10:23 AM

ASUNTO: Inscripción Recurso Humano para Mantenimiento de Dispositivos Médicos Considerados Equipos Biomédicos según radicado No.10027038 de fecha 2010/04/21.


Por medio de la presente le informo que los documentos mencionados en el asunto, fueron recibidos en esta subdirección e ingresada la información en nuestra base de datos con el siguiente número de inscripción:

No INSCRIPCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR CLASE
RH-201004-287	JHON JABER HENAO ROJO	I, IIA, IIB y III

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.

Gracias por su información.

Atentamente,

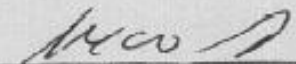
ANA GRACIELA CRIADO AUSSANT
Subdirectora de Insumos para la Salud y
Productos Varios.

SE ARCHIVA EN CARPETAS INSCRIPCIÓN DE PERSONAL
Proyectó: Ivette Xiomara Velozo Aldana
Profesional Contratista
27049215



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

**Hospital San José de San José de
Caldas E.S.E**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ENERO 2022



INDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	15
2.MARCO LEGAL.....	2
3.DEFINICIONES.....	3
4.OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO	5
5.DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	8
6.RECURSO HUMANO	13
7.ANEXOS	14



1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del mantenimiento, independientemente de la aplicación en que se desarrolle debe lograr la reducción de las fallas, debe procurar la prolongación de la vida útil de los componentes y con ello reducir los costos de operación. Esto refleja resultados como la mejora continua de la calidad, el rendimiento de los productos y la eficiencia de los servicios.

En el caso de los equipos Biomédicos hospitalarios, el mantenimiento debe contribuir a elevar la eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan a los habitantes de una comunidad, a la mejora de la calidad asistencial, calidad que se verá afectada si no existe un adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones por más nivel profesional médico que exista.

No se puede olvidar que el hospital tiene una peculiaridad que lo distingue de los procesos productivos y es que se está tratando con vidas humanas, lo que obliga a tener un nivel de exigencia muy especial.



2. MARCO LEGAL

- Ley 100 de 1993. Congreso de la República de Colombia.
- Decreto 1769 de 1994. Ministerio de Salud.
- Resolución 4445 de 1996. Ministerio de Salud.
- Decreto 2174 de 1996. Ministerio de Salud.
- Circular 029 de 1997. Superintendencia Nacional de Salud.
- Resolución 3100 de 2019. Ministerio de la protección social.

3. DEFINICIONES

EQUIPO BIOMEDICO.

Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

El equipo biomédico se clasifica en¹:

- De diagnóstico son, por ejemplo: los equipos de rayos X, los ecógrafos, los equipos de medicina nuclear, los tomógrafos axiales computarizados, los equipos de resonancia magnética nuclear, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los

¹ Circular 029 de 1997



electroencefalógrafos, los Holter, los capnógrafos, los medidores de O₂ y CO₂ indirectos, entre otros.

- De tratamiento y mantenimiento de la vida se consideran las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos exteriores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, los equipos de radioterapia y de terapia por radiaciones ionizantes, los equipos de diálisis, diatermias, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara cielítica), entre otros.
- De rehabilitación se consideran los aparatos para: terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.
- De prevención pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.
- De análisis de laboratorio son, por ejemplo: los medidores de acidez o base, centrifugas, balanzas, baños de maría, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores para banco de sangre, etc.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO

■ 4.1. GENERALES

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza el equipo Biomédico del hospital.
- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los Equipos Biomédicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para



la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

■ 4.2. ESPECIFICOS

- Lograr el desarrollo, conservación y mantenimiento adecuado de los equipos que posee el Hospital con los cuales se ejecutan las diferentes actividades propias del que hacer institucional.
- Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que posee El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Mantener los equipos en perfecto funcionamiento durante el mayor tiempo posible.
- Evaluar el funcionamiento de los equipos y realizar propuestas de actualización.
- Brindar asesoría sobre el manejo de los equipos al personal.
- Proyectar, en coordinación con los demás funcionarios, los programas de equipamiento y actualización de equipos en El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.



- Recolectar información sobre equipos, de manera que pueda dar asesoría a la administración y a los funcionarios sobre opciones de equipamiento.
- Archivar de manera sistemática los manuales de uso y de servicio de los equipos adquiridos por El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Garantizar las mediciones y condiciones de uso de los equipos para garantizar que los resultados obtenidos sean lo más exactos posible y redundando en el bienestar de la comunidad del área de influencia de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Mantener los equipos Biomédicos de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. en óptimas condiciones de uso para la atención del cliente externo y bienestar de los funcionarios.

■ 4.3 ALCANCE

Comprende la totalidad de los Equipos Biomédicos que pertenezcan o esté bajo la responsabilidad directa de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.

Se pretende ejercer un control eficiente sobre las actividades de mantenimiento que permita al final de la vigencia, realizar una evaluación de los alcances y cumplimiento del plan la cual debe ser mayor al 85%, teniendo en cuenta que una de las principales metas para esta vigencia es que la Institución cumpla con los requisitos de habilitación.



5. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

El plan busca dar las orientaciones básicas para la ejecución de los procesos de mantenimiento del equipo Biomédico, para que en la institución se puedan realizar los inventarios y auditoría, Disponiendo de esta manera de las herramientas que les permita generar con criterios técnicos los proyectos encaminados a su mejoramiento.

Esta metodología contiene los procedimientos y mecanismos, para lograr un correcto inventario y valoración en el área de dotación de equipos Biomédicos.

■ 5.1. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarla prolongación de la vida útil de los mismos.

Se debe realizar una estricta supervisión del proceso de instalación o entrega de equipos para asegurar que se hace en forma exacta según los manuales, para asegurar el perfecto funcionamiento y la operatividad eficiente de este. En la carpeta del equipo queda un documento donde está el detalle del proceso de ajuste con distintos parámetros de medición que hace parte de la “Ficha Técnica” del mismo y es sumamente útil para referencias futuras.

Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye: Limpieza, lubricación, revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.



A cada uno de los equipos se le lleva una carpeta en donde está detallada la trayectoria a través de los años.

5.1.1. Información de los equipos.

Se debe realizar un registro digitalizado de la información de los equipos Biomédicos en el software con el que cuenta la institución para este fin.

Para optimizar el sistema de información, se realizará la codificación de los equipos de la institución.

5.1.2. Equipo Biomédico.

Dadas las condiciones de la institución, la metodología para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, consiste en contratar con una empresa especializada estos servicios. Este contrato cubre los equipos biomédicos de baja, media tecnología que se encuentran ubicados en El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. Tales equipos se encuentran relacionados en el Anexo “Cronograma de actividades de mantenimiento a equipo biomédico”.

El alcance de este Contrato de Mantenimiento y Servicio es el siguiente: mantenimiento y cuidado de los equipos según el PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL mediante visitas pre-programadas según la necesidad del equipo. Ejecución de reparaciones o cambios para hacer efectivas las garantías. Atención a las llamadas en cualquier momento en que se presenten.

Están excluidos del cronograma otros equipos o dispositivos que, por su sencillez, bajo costo y tecnología, no inciden de forma significativa en la prestación de los servicios. Igualmente, se excluyen en esta sección los equipos de apoyo, la vidriería, el instrumental.

A partir de las revisiones al componente de mantenimiento se tienen identificadas ciertas necesidades referentes a los equipos de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E., razón por la cual se determina que se deben gestionar las siguientes actividades:



- Realizar un estudio por equipo para determinar la correcta periodicidad con que se deben programar las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante.
- Revisar el comportamiento de los equipos a través de tiempo (línea de trazabilidad) para darle un carácter dinámico al plan de mantenimiento.
- Realizar la interventoría del contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
- Desarrollar los diferentes formatos que se necesitan para una correcta administración del mantenimiento.
- Capacitar al personal sobre la correcta utilización de los diferentes equipos.
- Desarrollar manuales de correcta utilización, repuestos y mantenimiento de todos los equipos.
- Coordinar la realización de las actividades de mantenimiento correctivo que se presenten.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación biomédica a la cuál le aplican estos servicios.

La idoneidad del laboratorio se verificará con:

- Certificados de calibración de patrones
- Registros INVIMA del personal del laboratorio
- Acreditación ante la ONAC, según corresponda.



Como resultado del proceso metrológico se requerirán los respectivos stickers para cada equipo calibrado y los certificados de calibración, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

5.2. MOVIMIENTO INTERNO DE ACTIVOS.

Con el fin de mantener actualizado el inventario y evitar traumatismos al momento de realizar el conteo físico, y que al mismo tiempo los encargados de cada servicio tengan un control sobre los bienes que tengan a su cargo, se debe diseñar e implementar un formato para movimiento de activos, el cual debe ser diligenciado por el responsable del servicio y llevado al encargado de Mantenimiento, quien realizará la gestión administrativa para su respectiva aprobación e inclusión en la documentación y en el sistema.

■ **5.3 PAZ Y SALVO A FUNCIONARIOS**

En el momento de que un funcionario se retire del hospital, el encargado de mantenimiento deberá expedir un certificado de paz y salvo en cuanto a los equipos asignados al funcionario, en el cual se expedirán los datos básicos del funcionario retirado y de los equipos. Deberá estar firmado por la persona respectiva y el encargado de mantenimiento.

6. RECURSO HUMANO

Para la administración del área de mantenimiento hospitalario, El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. tiene asignadas las diferentes funciones de este componente entre su gerente, El Dr. Fernando Salazar Villegas, quien se encarga del componente administrativo al realizar todo el manejo documental, de planeación y la contratación, al igual que la Supervisión de las diferentes actividades de mantenimiento.

El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. garantizará la realización del mantenimiento de los equipos biomédicos, bajo la modalidad de contratación con personal idóneo y capacitado, el cual tendrá los elementos o herramientas



necesarias para llevar a cabo dicho mantenimiento. Dicha idoneidad y capacidad técnica debe quedar demostrada y hacer parte del respectivo contrato.

Esta modalidad se emplea en la medida en que la institución no cuenta con el personal de planta ni con los elementos, herramientas o las instalaciones apropiadas para la realización de dichas labores.

7. ANEXOS

PROTOCOLO MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO

■ **PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL**

Revisión del estado físico del equipo, revisión sistema de alimentación de acuerdo a su subsistema, verificación de visualizadores, indicadores y/o programadores de variables en el equipo, chequeo de actuadores, pruebas funcionales y limpieza general.

MANEJO DOCUMENTAL

Se cuenta con software de mantenimiento que permite la fácil y constante actualización del inventario activo, de igual forma se puede verificar desde cualquier ordenador con acceso a internet e ingresando con la clave de usuario las HOJAS DE VIDA, REPORTES PREVENTIVOS, REPORTES CORRECTIVOS, CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTOS ANEXOS en formatos PDF.



Manizales, Enero 2022

Señores:

HOSPITAL SAN JOSÉ

San José – Caldas.

Asunto: PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO

Actividades realizadas a los diferentes equipos:

- **TENSIOMETROS.**
 - Verificación de funcionamiento.
 - Limpieza de componentes y accesorios.
 - Comprobación de calibración de presión con tensiómetro de referencia, si el equipo verificado se encuentra desajustado se procede a su ajuste, el método usado es el de comparación de medidas.
 - Verificación de funcionamiento y limpieza general.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.
- **PESAS DE PISO CON TALLÍMETRO.**
 - Ajuste de plataforma de medida.
 - Ajuste de barras de medida.
 - Lubricación de guías, tensores y accesorios.
 - Comprobación de calibración de peso con pesas de referencia, si el equipo verificado se encuentra desajustado, se procede a su ajuste, el método usado es el de comparación de medidas.
 - Limpieza general, verificación de funcionamiento.



- Puesta en cero iniciales.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

• NEBULIZADOR

- Lubricación de motor.
- Ajuste de conectores de mangueras.
- Revisión de filtro de admisión de aire.
- Verificación de compresión.
- Limpieza interna y externa.
 - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.

• PESAS DE PISO

- Verificación de calibración de peso con pesas de referencia,
- Ajuste de cero iniciales.
- Ajuste de plataforma.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

• EQUIPOS DE ORGANOS

- Limpieza de otoscopio, oftalmoscopio, mango, Revisión de contactos eléctricos.
- Verificación de funcionamiento, limpieza general.
- Revisión de sensores, circuito electrónico.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, se deben limpiar de manera independiente Otoscopio y Oftalmoscopio no se



debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto. Procurar que la solución de limpieza no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado,

- **ELECTROCARDÍOGRAFO.**

- Limpieza de chupas y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.

- ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.
- ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico.

- **DOPPLER FETAL**

- Revisión de transductor (HR)
- Limpieza de Cabezal
- Ajuste de parámetros funcionales.
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Limpieza general

- ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de alcohol al 75%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución



no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado.

- ✓ No halar el cable del transductor, no enrollarlo al momento de su almacenamiento, verificar la polaridad de la batería cuando se realice el cambio de la misma

- **ELECTROCAUTERIO**

- Limpieza componentes eléctricos
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Revisión de electrodo disperso, electrodo activo e interruptor de pie.
- Verificación de funcionamiento.
- Limpieza interna y externa.
 - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado
 - ✓ Revisar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica adecuada (120V). Revisar cables y accesorios.

- **ASPIRADOR**

- Limpieza de compresor.
- Limpieza de válvulas Flappers
- Revisión de diafragma
- Verificación de máximo nivel de vacío (Este no puede ser inferior de 35 cmHg).
- Lubricación
- Verificación de filtro
- Revisión de funcionamiento general.
 - ✓ Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol etílico como por ejemplo SURFALKAN, usar un paño suave seco para retirar el exceso del producto utilizado, **No** utilizar hipoclorito de sodio para su limpieza, ya que produce corrosión de partes metálicas, procurar que la solución no ingrese al interior del



equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.

- **OXIMETROS.**

- Limpieza de componentes electrónicos
- Revisión de sensores emisor, receptor
- Limpieza general
 - ✓ Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol etílico, usar un paño suave seco para retirar el exceso del producto.

- **MICROSCOPIOS**

- Limpieza de lentes, en oculares, objetivos.
- Limpieza de prismas.
- Lubricación de sistema mecánico.
- Revisión circuito eléctrico
- Limpieza general.
 - ✓ Realizar limpieza de lentes de oculares con alcohol isopropílico, utilizar aplicadores de algodón, no ejercer demasiada presión sobre el lente. Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol etílico como por ejemplo SURFALKAN, usar un paño suave seco para retirar el exceso del producto utilizado, **No** utilizar hipoclorito de sodio para su limpieza.

- **MONITOR DE SIGNOS VITALES.**

- Limpieza de Accesorios y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión de sensor SPO2, Brazaletes de PNI.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
 - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto



utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.

- ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos y accesorios en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico y de signos vitales.

- **DEFIBRILADOR.**

- Limpieza de Cables y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
- Test de descarga a 200 o 100 Joules Según equipo.
- **Realizar protocolos para la desfibrilación, tener en cuenta los cuidados de manipulación del equipo, del paciente y del entorno.**
 - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.
 - ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico, preparar el paciente para el procedimiento según protocolos.

CAVITRÓN

- Limpieza de Cables y pieza de mano.
- Verificación de funcionamiento.
- Limpieza de interruptor de pie.



- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

AMALGAMADOR

- Revisión circuito eléctrico.
- Limpieza de estructura
- Ajuste de cucharillas
- Verificación de funcionamiento.
- Ajuste sistema mecánico.
- Limpieza interna y externa.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

AUTOCLAVE.

- Limpieza de tanque
- Revisión circuito eléctrico.
- Limpieza de cámara
- Ajuste empaque
- Revisión de máxima presión de trabajo.
- Limpieza general.
- Revisión ajuste de puerta.
 - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto, para la limpieza del interior de la cámara en autoclaves de mesa, se debe utilizar un producto de características similares a la Cleandina.



LAMPARA DE FOTOCURADO

- Limpieza interna y externa.
- Revisión de circuito eléctrico y Electrónico.
- Verificación de funcionamiento
- Limpieza de fibra
- Revisión de carga y baterías (Inalámbricas)

UNIDAD ODONTOLOGICA

- Revisión de circuitos eléctricos
- Revisión de sistema neumático
- Revisión de sistema hidráulico.
- Revisión de presión de trabajo (Máx. 35 Libras)
- Verificación de funcionamiento de módulo de servicios.
- Limpieza de escupidera, verificación de funcionamiento.
- Limpieza interna y externa.

COMPRESOR.

- Revisión de presión de trabajo. (80 - 100 Libras)
- Purga de sistema neumático.
- Revisión y ajuste de tubería.
- Revisión de sistema de control de presión.
- Verificación de funcionamiento de motores.
- Revisión de circuito eléctrico.
- Limpieza general.

PESA BEBÉ DIGITAL

- Verificación de calibración de peso con pesas de referencia,



- Ajuste de cero iniciales.
- Ajuste de plataforma.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico,

MONITOR FETAL

- Revisión de circuitos electrónicos.
- Revisión de transductores TOCO y HR.
- Revisión de marcador de eventos.
- Revisión y limpieza de impresora.
- Verificación de parámetros funcionales.
- Comprobación de funcionamiento de controles.
- Limpieza general.

- ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

INCUBADORA.

- Revisión de filtro de entrada de aire.
- Revisión de grupo motor (Ventilador y Resistencia)
- Verificación de funcionamiento de sensores de temperatura.
- Comprobación de funcionamiento control de temperatura
- Limpieza de cúpula en acrílico
- Limpieza de receptáculo de bebé.
- Revisión de ajuste de parámetros funcionales.
- Limpieza interna y externa.

La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o solución jabonosa, NO usar alcohol al limpiar la cubierta en acrílico, usar un paño seco para retirar los excesos Agua o solución jabonosa.



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

2022

URGENCIAS

	Tipo de documento:		REGISTRO		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5															
	Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO																	
	Area o proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA																	
	Ultima actualización:		ene-22																	
DATOS GENERALES PRESTADOR																				
NOMBRE DE LA ENTIDAD		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5						SAN JOSE			DEPARTAMENTO			CALDAS			COMPLEJIDAD	I	AÑO	2022
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO			
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																				
URGENCIAS TRAUMA																				
LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA "HANAULUX" LUZ HALOGENA	55002462	169	SEMESTRAL	N.A		P											P	Revisión de contactos, baterías Prueba de funcionamiento - AMC SUMINISTROS		
ELECTROCARDIOGRAFO ECG EDAN	360250-M20A102200	N.V	SEMESTRAL	oct-22		P											P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros		
DESFILIBRILADOR BIFASICO MARCAPASOS	BENEHEART D3 SERIE: EZ-08044867	N.V	SEMESTRAL	oct-22		P											P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros		
DESFILIBRILADOR BIFASICO MARCAPASOS ESXTERNO WEL	87842	435	SEMESTRAL	oct-22		P											P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros		
MONITOR SIGNOS VITALES EDAN IM8	36001-M21308660016	N.V	SEMESTRAL	oct-22		P											P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG, SPO2, PNI y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIAS	N.A	16-498	SEMESTRAL	N.A		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
LARINGOSCOPIO ADULTOS Y PEDIATRICO DE 8 VALVAS	N.A	16-505	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	N.A	16-606	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR FOLEE HOO3-C	201015704030272	N.V	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
SIERRA CORTA YESO													
URGENCIAS/OBSERVACION/CONSULTA EXTERNA													
TERMOHIGROMETRO DIGITAL (VITRINA MEDICAMENTOS)	N.A	16-570	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL (VITRINA MEDICAMENTOS)	N.A	16-571	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO KAIYA	N.A	16-499	SEMESTRAL	oct-22		P					P		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento - AMC
SIERRA CORTA YESO	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETR O	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
PESA BEBE KEX GERMANI BS-011	N.A	16-543	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA DETECTO	EOO4160033- EOO8160121	16-533	SEMESTRAL	oct-22		P					P		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
PULSO OXIMETRO CMS ADULTO	negro	N.A	SEMESTRAL	oct-22		P					P		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO					
					MANTENIMIENTO		CALIBRACIÓN		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Pulso oxímetro adulto	rosado	N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
PULSO OXIMETRO DE MANO 821 PEDIATRICO	N.A	16-523	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSÍOMETROS PEDIÁTRICOS	CE 0050	N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN	81218212859	16641	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD 300C2	202865300359	N.V	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN sys 6010	9142012105964	N.V	SEMESTRAL	oct-22																	P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN sys 6010	9142012105988	N.V	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR DE SIGNOS CREATIVE MEDICALVITALES DELUXE 100	J3000QL00260	N.V	SEMESTRAL	oct-22																	P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD 300C2	202865300952	N.V	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOMETRO INFRARROJO UT 300H URGENCIAS	ir2004018507	N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																						
CONSULTA EXTERNA																						
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARD WELTCHALLYN CONSULTORIO 1	ref 11720	16-589	SEMESTRAL	N.A																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA PESA BEBÉ SECA MODELO 354 COS 1	8354210200940	N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 1	N.A	16642N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 1	560042-M20A09560013	N.A	SEMESTRAL	oct-22																	P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD300C2 COS 1	203009008961	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO CONSULTORIO 1	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO AIRSEP CONSULTORIO 1	bub0115190403	16-580	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS WELCH ALLYN CONSULTORIO 1	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
NEBULIZADOR APEX CONSULTORIO 1	mo3ox06128	16O582	SEMESTRAL	N.A						P									P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 1	181218192758	16642	CUATRIMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO AIRSEP CONSULTORIO 2	bub0115280012	16-579	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
EQUIPO ÓRGANOS Y SENTIDOS WELCH ALLYN PARED CONSULTORIO 2	ref 11720	16-590	SEMESTRAL	N.A						P									P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
NEBULIZADOR APEX CONSULTORIO 2	mo3ox06128	16-583	SEMESTRAL	N.A						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIÓMETRO WELCH ALLYN RODABLE CONSULTORIO 2	SN0604101	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 2	560042-M20A09560011	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO MD300C2 CONS 2	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 2 GMD	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
PESA BEBÉ SECA 354 CONS 2	8354063191006	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 2	181227173358	16643	SEMESTRAL	oct-22						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN CONSULTORIO 3	ref 11720	16-591	SEMESTRAL	N.A						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO "" VERDE CONSULTORIO 3	I9Q30734	N.A	SEMESTRAL	N.A						P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 3	181227181559	16644	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 3	560042-M20A09560012		SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD300C2 CONS 3	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONS 3	GMD	N.V	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO LITMANN QUALITY JEFE ENFERMERÍA	i12b46002	N.A	SEMESTRAL	N.A			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO W.A JEFE ENFERMERÍA	110317194534	N.A	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
LÁMPARA CUELLO DE CISNE CITOLOGÍAS	N.V	16-412	SEMESTRAL	N.A			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO FARMACIA	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL FARMACIA	N.V	16-551	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL FARMACIA	N.V	15-552	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL ESTADISTICA	N.V	16-553	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL CUARTO DE RESIDUOS	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL CUARTO DE OXIGENO	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-22			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Nebulizador NUBE	20331010003740	N.A	SEMESTRAL	N.A			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Nebulizador NUBE	20331010001610	N.A	SEMESTRAL	N.A			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Nebulizador NUBE	20331010001616	N.A	SEMESTRAL	N.A			P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5**

TERMOMETRO INFRARROJO JXB-178 CONSULT 1	M08200576947	N.A	SEMESTRAL	oct-22									P													P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOMETRO INFRARROJO FI01 CONST 2	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A									P													P															SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC			
TERMOMETRO INFRARROJO FI01 CONST 3	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A									P													P															SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC			





MANTENIMIENTO

	Tipo de documento:		REGISTRO
	Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
	Area o proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA
	Ultima actualización:		ene-22

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES PRESTADOR

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5				SAN JOSE												COMPLEJIDAD	I	ANO		
				DEPARTAMENTO						CALDAS										
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO			
					MANTENIMIENTO		CALIBRACIÓN		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
ELECTROCARDIOGRAFO SMART ECG SALE PARA MANTENIMIENTO	SE33A030846958ZB	16-486	SEMESTRAL	oct-22															P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
MONITOR SIGNOS VITALES IMEC 8	ew-29001585	16-428	SEMESTRAL	oct-22															P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG, SPO2, PNI y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
LÁMPARA RODABLE LUZ HALÓGENA RITHER	N.A	102		N.A																
PULSO OXIMETRO DE MANO 821 PEDIATRICO	N.A	16-524	SEMESTRAL	N.A															P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO LORD GRIS	1204074	N.A	SEMESTRAL	N.A															P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50	360069-M18923530054	16-587	SEMESTRAL	oct-22															P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MOD MEC- 1200	cc75-2409	N.A	SEMESTRAL	N.A															P	Revisión de motor, térmicos, mangueras y acoples, cambio de filtro hidrofóbico, revisión de conexiones, limpieza general. Inspección interna y externa. Pruebas de funcionamiento - AMC
EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA REF CHEMRAY	40161042et	16-487		N.A																



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

FONENDOSCOPIO ESPLINGER	i11w63834	N.A	SEMESTRAL	N.A																			P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIÓMETRO	111115000000	N.A	SEMESTRAL	oct-22																			P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO	N.A	N.A		oct-22																											
FONENDO	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN	111007164603		SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE AJUSTE DE PRESIÓN AMC
FONENDOSCOPIO RIESTER	DUPLEX		SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DE DEDO CHOICEMMED MD300C2	203009008927		SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DE DEDO CREATIVE MEDICAL PRINCE 100D	XCS108QL725148		SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR THOMAS 1130 SERIE: 99500004904	99500004904		SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR YX 2000	N.V		SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-101	O80.19068		SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3			SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR SMAF SXT-5A	L10.18.146		SEMESTRAL	oct-22																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
LÁMPARA DE FOTOCURADO BEYOND 3000	112370			N.A																											
DOPPLER FETAL EDAN	N.V	16540		N.A																											
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN REF: 901039	5079-135		SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO BOKANG REF: BK3004	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																				P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

FONENDOSCOPIO BOKANG REF: BK3004			SEMESTRAL	N.A																	P											P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR FETAL EDAN F3	560034-M20908340003		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE AJUSTE DE PRESIÓN AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	1582231		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	152333		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	164194		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	152334		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	115033		SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
REGULADOR DE ROSCA RESPONSIVE			SEMESTRAL	oct-22																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASIC II	111W63834		SEMESTRAL	N.A																		P										P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITALIZACION

	Tipo de documento:		REGISTRO
	Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
	Área o proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA
	Ultima actualización:		ene-22

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

HOSPITALIZACIÓN/HOMBRES/MUJERES/PEDIATRÍA

DATOS GENERALES PRESTADOR

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5				COMPLEJIDAD		I	AÑO		2022										
				SAN JOSÉ		DEPARTAMENTO		CALDAS											
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO		
					MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
INCUBADORA "DAVID MEDICAL" YP 90A HOSPITALIZACION (PEDIATRIA)	06071002013	16-0297	SEMESTRAL	oct-22														P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN	SYS 6010	N.A	SEMESTRAL	oct-22														P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5**

CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A															P																P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC														
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A															P																						P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC								
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A															P																										P						SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC					
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A															P																												P						SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC			
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A															P																															P						SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



PARTOS

		Tipo de documento:	REGISTRO														HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5		
Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO																	
proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA																	
actualización:		ene-22																	
DATOS GENERALES PRESTADOR																			
NOMBRE DE LA ENTIDAD		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5							COMPLEJIDAD			I		AÑO		2022			
							SAN JOSE			DEPARTAMENTO			CALDAS						
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO		
					MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																			
PARTOS																			
TERMOHIGROMETRO DIGITAL		16572	SEMESTRAL	oct-22														P	SE REALIZA LIMPIEZA, GENERAL AMC
TENSIOMETRO NEONATAL WELCHALLYN	80105074629	16-584	SEMESTRAL	oct-22														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
UNIDAD PORTATIL DE Aspiración MODELO SXT5A MARCA SMAF	16-585	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	oct-22														P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
UNIDAD PORTATIL DE ABSORCION MODELO SXT5A MARCA SMAC	16-586	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	oct-22														P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CAMA PARA PARTOS DOMETAL	135-22-- 0000057052	16-538	SEMESTRAL	N.A														P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

COLPOSCOPIO "GOLD WAY" S16-2000 ANEXOS CPU LK	22000511-010		SEMESTRAL	N.A		P							P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CONCENTRADOR DE OXIGENO AIRSEP	bub0115280009	16-581	SEMESTRAL	oct-22		P							P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
DOPPLER SONOTRX BASIC A	304133M1770942 0017	16-532	SEMESTRAL	oct-22		P							P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
INFANTOMETRO DLM DIGITAL DETECTO USA	C13020611	16-535	SEMESTRAL	oct-22		P							P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
ELECTROCAUTERIO "ELLMAN"	0002595	333	SEMESTRAL	oct-22		P							P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDO LITTMAN GRIS	I4N40158		SEMESTRAL	N.A		P							P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
INCUBADORA "DAVID MEDICAL" MOD: YP-G-M1	ABZAZ10005	N.A	SEMESTRAL	oct-22		P							P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
LAMPARA DE CALOR RADIANTE MOD-HKN-9010	22170801008	16-537	SEMESTRAL	oct-22		P							P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICA+AD31NICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
LAMPARA AUXILIAR "WELCH ALLYN"	LS-135	337	SEMESTRAL	N.A		P							P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MESA EXAMEN PEDIATRICA C/BALANZA TALLIMETRO M	V1161119	16-536	SEMESTRAL	oct-22		P							P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5**

MONITOR FETAL GENERAL MEDITECH	g6a171208	16-578	SEMESTRAL	oct-22							P								P											SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR FETAL EDAN F3	560034-M20C19260022	N.A	SEMESTRAL	oct-22							P								P											SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50	360069-M18923530057	16-588	SEMESTRAL	oct-22							P								P											Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO LORD AZUL	1064583	N.V	SEMESTRAL	oct-22							P								P											SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Bombas de infusión medcaptain modelo sys 6010	9142012106014	N.V	SEMESTRAL	oct-22							P								P											SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DESFIBRILADOR MINDRAY D3 BENEHEART	EZ-08044867	N.V	SEMESTRAL	oct-22							P								P											SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5**

AMBULANCIAS

		Tipo de documento:		REGISTRO	
Proceso que lo genera:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO		GESTION BIOMEDICA	
Fecha de realización:		ene-22			

														HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES PRESTADOR																		
NOMBRE DE LA ENTIDAD	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5										COMPLEJIDAD	I	AÑO	2022				
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO	
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																		
AMBULANCIA OVM 289																		
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM8	360001-M21308650005	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	Revisión de motor, térmicos, mangueras y acoples, cambio de filtro hidrofóbico, revisión de conexiones, limpieza general. Inspección interna y externa. Pruebas de funcionamiento - AMC
TENSÍOMETRO ADULTO WELCH ALLYN	140715195207	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
			CUATRIMESTRAL															
TENSÍOMETRO PEDIÁTRICO ALP K2 874269	k2874269	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO ADULTO	LITTMANN	N.A	SEMESTRAL	N.A													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR DE SECRECIONES CON DISPOSITIVOS PARA SUCCIÓN	c SS	16-504	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DESFIBRILADOR PRMEDIC XD 110XE	73675000317	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO		
					MANTENIMIENTO														
					Calibración	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
REGULADOR MEDICINAL PRECALIBRADOA 50 PSI	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FLUJOMETRO DE PARED	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
REGULADOR YUGO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																			
AMBULANCIA OUC 765																			
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM8	36001-M21308650090	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	Revisión de motor, térmicos, mangueras y acoples, cambio de filtro hidrofóbico, revisión de conexiones, limpieza general. Inspección interna y externa. Pruebas de funcionamiento - AMC
FONENDOSCOPIO SPRAGUE LORD	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIÓMETRO DE ADULTO WELCHALLYN	70613185071	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIÓMETRO DE MANO TYCOS CON BRAZALETE PED.	11213880	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FLUJOMETRO SENCILLO AMVEX	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR DE SECRECCIONES 7ED	20101570403	16-716	SEMESTRAL	oct-22						P								P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
REGULADOR DE OXIGENO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22						P								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



LABORATORIO

		Tipo de documento:		REGISTRO													
Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5													
Área o proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA															
Última actualización:		ene-22															
DATOS GENERALES PRESTADOR																	
NOMBRE DE LA ENTIDAD				HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5				COMPLEJIDAD		I		ANO		2022			
				SAN JOSÉ				DEPARTAMENTO				CALDAS					
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																	
LABORATORIO CLÍNICO																	
INCUBADORA PARA CONTROL BIOLÓGICO	N.V	6566	SEMESTRAL	oct-22												P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
INCUBADORA MEMMERT	N.V	95	SEMESTRAL	oct-22												P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
AGITADOR "CHEM" MOD.DRS	N.V	261	SEMESTRAL	N.A												P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CENTRIFUGA "S.U.S" 12 TUBOS MODELO CM-120	N.V	263	SEMESTRAL	oct-22												P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
EQUIPO DE HEMATOLOGÍA RAYTO	821514026EQ	16-488	SEMESTRAL	N.A												P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MICROPIPETA "BOECO" 100 - 100 UL	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-22												P	Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
MICROPIPETA "BRAND" 5-50 UL	N.V	11	SEMESTRAL	oct-22												P	Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5**

MICROSCOPIO "OLYMPUS"	N.V	16-030	SEMESTRAL	N.A															P																					P	Revisión y limpieza general, inspección de oculare, prismas, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TERMOHIGROMETRO AZUL GRANDE	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-22															P																				P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT- 803E"	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-22															P																				P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
PIPETA AUTOMATICA HUMAN 5- 50UL	N.V	16-097	SEMESTRAL	oct-22															P																				P	Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC	
CENTRÍFUGA INDULAB C4	15986	N.A	SEMESTRAL	oct-22															P																				P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
EQUIPO DE QUÍMICA BA-88A	WR- 0A035873	16-097	SEMESTRAL	oct-22															P																				P	Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

VACUNACION

EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO	
					MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov
VACUNACIÓN																		
ENFRIADOR INDUSTRIAL HTAL MARCA VESTFROST REF : MF304	200944	384	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE CONTROL, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONGELADOR HTAL MARCA VESTFROST REF : MF214 BASE RODANT	200833	390	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE CONTROL, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA DETECTO	E004160042	16-534	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BASCULA DE PISO WELCHALLYN HEALTH O METER		415	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO MAX Y MIN	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MÍNIMAS CE PEQUEÑO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO	GMD	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO	GMD	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOMETRO INFRARROJO JXB-178	M08200576948	N.A	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

APS –UNIDAD MOVIL

		Tipo de documento:	REGISTRO													HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5			
		Proceso que lo genera:	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO																
		Ultima actualización:	GESTION BIOMEDICA																
			ene-22																
DATOS GENERALES PRESTADOR																			
NOMBRE DE LA ENTIDAD		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5										COMPLEJIDAD		ANO	2022				
		SAN JOSÉ					DEPARTAMENTO					CALDAS							
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO		
					MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																			
APS / UNIDAD MÓVIL																			
Unidad odontológica portátil	N.V	16-592--16-593	SEMESTRAL	N.A													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ROJO	N.V	16-596	SEMESTRAL	N.A													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
TENSIOMETRO MANUAL LORD	N.V	17-597	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
BALANZA DIGITAL MEDIDOR DE GRASA CORPORAL	2018041600612	16-594	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL	N.V	16-595	SEMESTRAL	oct-22													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
EQUIPO DE ORGANOS DE PASTA GMD	N.V	16-598	SEMESTRAL	N.A													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

UNIDAD MÓVIL																					
Fonendoscopio pediátrico lord rosado	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Oxímetro de pulso azul	N.V	16638	SEMESTRAL	oct-22										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Autoclave digital technology	0413-1668	16672	SEMESTRAL	oct-22										P						P	Revisión y limpieza general, inspección de conexiones eléctricas, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
Unidad odontológica draco	N.V	16670	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Compresor odontológico thomas	608996d	16671	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Amalgamador tpc	1130870	16674	SEMESTRAL	N.A										P						P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
Lámpara de fotocurado dtm	20181230699	16673	SEMESTRAL	oct-22										P						P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
Pieza de mano	201909161032	N.V	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Pieza de mano	201909161044	N.V	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Micro motor pieza de baja	0190410154	N.V	SEMESTRAL	N.A										P						P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
Tensiómetro pediátrico	836572	16668	SEMESTRAL	oct-22										P						P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
Fonendoscopio pediátrico	N.V	16667	SEMESTRAL	N.A										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Tensiómetro adulto	N.V	16666	SEMESTRAL	oct-22										P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

Fonendo adulto	N.V	16665	SEMESTRAL	N.A																P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Pesa digital adulto	Gbs -903	16664	SEMESTRAL	oct-22																P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Pesa bebe HEALTH O METER	3860010769	16662	SEMESTRAL	oct-22																P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Equipo de órganos GMD	N.V	16663	SEMESTRAL	N.A																P						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Lámpara cuello de cisne KRAMER	N.V	16661	SEMESTRAL	N.A																P						P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

ODONTOLOGIA

		Tipo de documento:	REGISTRO															
Nombre:		PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5														
Área o proceso que lo genera:		GESTION BIOMEDICA																
Última actualización:		ene-22																
DATOS GENERALES PRESTADOR																		
NOMBRE DE LA ENTIDAD		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5						COMPLEJIDAD		I		AÑO		2022				
SAN JOSE						DEPARTAMENTO				CALDAS								
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO	
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																		
APS / UNIDAD MÓVIL																		
TEMOHIGROMETRO DIGITAL	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-22													P	Revisión y limpieza general, ajuste de conexiones eléctricas - hidráulicas, inspección de mangueras, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
LÁMPARA DE FOTOCURADO VERDE	N.V	16640	SEMESTRAL	oct-22													P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
CAVITRÓN BONART	ART-M1 25K	16639	SEMESTRAL	N.A													P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
AMALGAMADOR DOGITAL MILLNIUM	AAA12412	454	SEMESTRAL	N.A													P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
CABEZA DE CONTRAANGULO NSK	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A													P	Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

PIEZA DE BAJA VELOCIDAD NSK	ABBZ0103 / EBEZ2873	N.V	SEMESTRAL	N.A														P															P						Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
PIEZA DE BAJA VELOCIDAD NSK	EBD30730 / EBE 20377	N.V	SEMESTRAL	N.A														P																	P				Revisión y ajuste general, lubricación , pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS





ESTERILIZACION

EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA												ACTIVIDADES / ENCARGADO												
					MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic										
ESTERILIZACIÓN																													
AUTOCLAVE AUTOMAT 5000	5000-0001	16-497	SEMESTRAL	oct-22											P													P	Revisión y limpieza general, ajuste de conexiones eléctricas - hidráulicas, inspección de mangueras, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	N.A	16-573	SEMESTRAL	oct-22											P													P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
AUTOCLAVE STAR CLAVE 18 LITROS	A18L0100	NT	SEMESTRAL	oct-22											P													P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



CAMAS HOSPITALARIAS (DONACION MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL)

	VISITA 1	VISITA 2	VISITA 3	VISITA 4
CAMAS ELECTRICAS TRES PLANOS (cantidad 5)	Abril del 2021	Octubre del 2021	Abril del 2022	Octubre de 2022

CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE

	VISITA 1	VISITA 2	VISITA 3	VISITA 4	VISITA 5	VISITA 6
CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE (cantidad 5)	Marzo de 2021	Septiembre del 2021	Marzo del 2022	Septiembre de 2022	Marzo de 2023	Septiembre de 2023

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2022



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA D/M/A	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GUADAÑA HUSQVARNA	MANTENIMIENTO	16652	MENSUAL	31-28-28-25-30-27-25-29-26-31-28-26-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES, LIMPIEZA.
PLANTA ELÉCTRICA Suzuki	MANTENIMIENO	281	CUATRIMESTRAL	17-01-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE CARGA, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES
				23-05-2022		
				19-09-2022		
PLANTA ELECTRICA UNIDAD MOVIL	MANTENIMIENTO	16655	CUATRIMESTRAL	17-01-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE CARGA, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES
				23-05-2022		
				19-09-2022		
PLANTA ELECTRICA HOSPITAL	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	17-01-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE CARGA, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES, FILTROS , AGUA
				23-05-2022		
				19-09-2022		
HIDROLAVADORA 2 HP	MANTENIMIENO	427		17-01-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE PRESIÓN, PARTES
				23-05-2022		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

			CUATRIMESTRAL	19-09-2022		MÓVILES, PRUEBAS FUNCIONALES
LAVADORA MABE	LAVANDERIA	300	CUATRIMESTRAL	21/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				20/06/2022		
NEVERA LG	COCINA	406	CUATRIMESTRAL	21/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				20/06/2022		
Nevera autofrost 8 pies Mabe	LABORATORIO	16-265	CUATRIMESTRAL	24/10/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				21/02/2022		
nevera samsung 4 pies	FARMACIA	N/P	CUATRIMESTRAL	20/06/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				24/10/2022		
Nevera Samsung 4 pies	SANEAMIENTO	345	CUATRIMESTRAL	21/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				20/06/2022		
				24/10/2022		
				21/02/2022		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

CHALLENGER Nevera	RESIDUOS PELIGROSOS	N/P	CUATRIMESTRAL	20/06/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				24/10/2022		
PURIFICADOR DE AGUA	COCINA	129	CUATRIMESTRAL		JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS, FILTRO, PRUEBAS FUNCIONALES
REDES ELÉCTRICAS	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	28/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUNCIONALIDAD Y ESTADO DE TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES Y FOCOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
				27/05/2022		
				23/09/2022		
REDES HIDRICAS	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	07/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE TUBERÍAS, GRIFOS, BAÑOS, DUCHAS, PRESENCIA DE FUGAS.
				06/06/2022		
				10/10/2022		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (UNO	HOSPITAL		TRIMESTRAL	03/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.
				11/04/2022		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

				11/07/2022		ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				03/10/2022		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (DOS)	HOSPITAL		TRIMESTRAL	14/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.
				16/05/2022		
				08/08/2022		ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				21/11/2022		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (TRES)	HOSPITAL		TRIMESTRAL	14/03/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.
				06/06/2022		
				05/09/2022		ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				12/12/2022		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

TECHOS	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	10/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANALES. ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				09/06/2022		
				12/10/2022		
ÁREA CONSTRUIDA	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	25/02/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	ESTADO DE PINTURA, CIELORRASO, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS.
				24/06/2022		
				28/10/2022		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	08/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FECHAS DE CADUCIDAD DE EXTINTORES, BARANDAS DE SEGURIDAD, CINTAS ANTIDESLIZANTES, TIMBRES Y ALARMAS.
				07/05/2022		
				10/09/2022		
AMBULANCIA TOYOTA MODELO 2008	HOSPITAL	OUC 765	CUATRIMESTRAL	25/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS, INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS
				24/05/2022		
				27/09/2022		
AMBULANCIA DIMAX 2015	HOSPITAL	OVM 289	CUATRIMESTRA	25/01/2022	JUAN DAVID LONDONO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS ,INDICADORES, LUCES
				24/05/2022		




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

				27/09/2022	QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS
CAMIONETA TOYOTA MODELO 1994	HOSPITAL	OUC 773	CUATRIMESTRA	25/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INDICADORES, LUCES Y PRUEBAS MECÁNICAS
				24/05/2022		
				27/09/2022		
UNIDAD MOVIL FOTON 2020	HOSPITAL	OVM353	CUATRIMESTRAL	25/01/2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS ,INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS.AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE AGUA.
				24/05/2022		
				27/09/2022		
ÁREAS VERDES	HOSPITAL		MENSUAL	31-28-28-25-30-27-25-29-26-31-28-26-2022	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN: CORTE DE PRADOS
VENTANAS (49)	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	26/03/2022	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION: ESTADO DE VIDRIOS, MARCOS, PINTURA Y SU FUNCIONAMIENTO
				15/07/2022		
				26/11/2022		
PUERTAS (63)	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	26/03/2022	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION: ESTADO DE MARCOS, PINTURA, LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y SU FUNCIONAMIENTO
				15/07/2022		
				26/11/2022		
MUEBLE DE USO ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	22/03/2022	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE	VERIFICACION :ESTADO DE MUEBLES, OBSERVACIÓN DE
				19/07/2021		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

				15/11/2022	DE MANTENIMIENTO	BROMA, COMEJÉN SILLAS FRACTURADAS Y SU FUNCIONAMIENTO
--	--	--	--	------------	---------------------	---

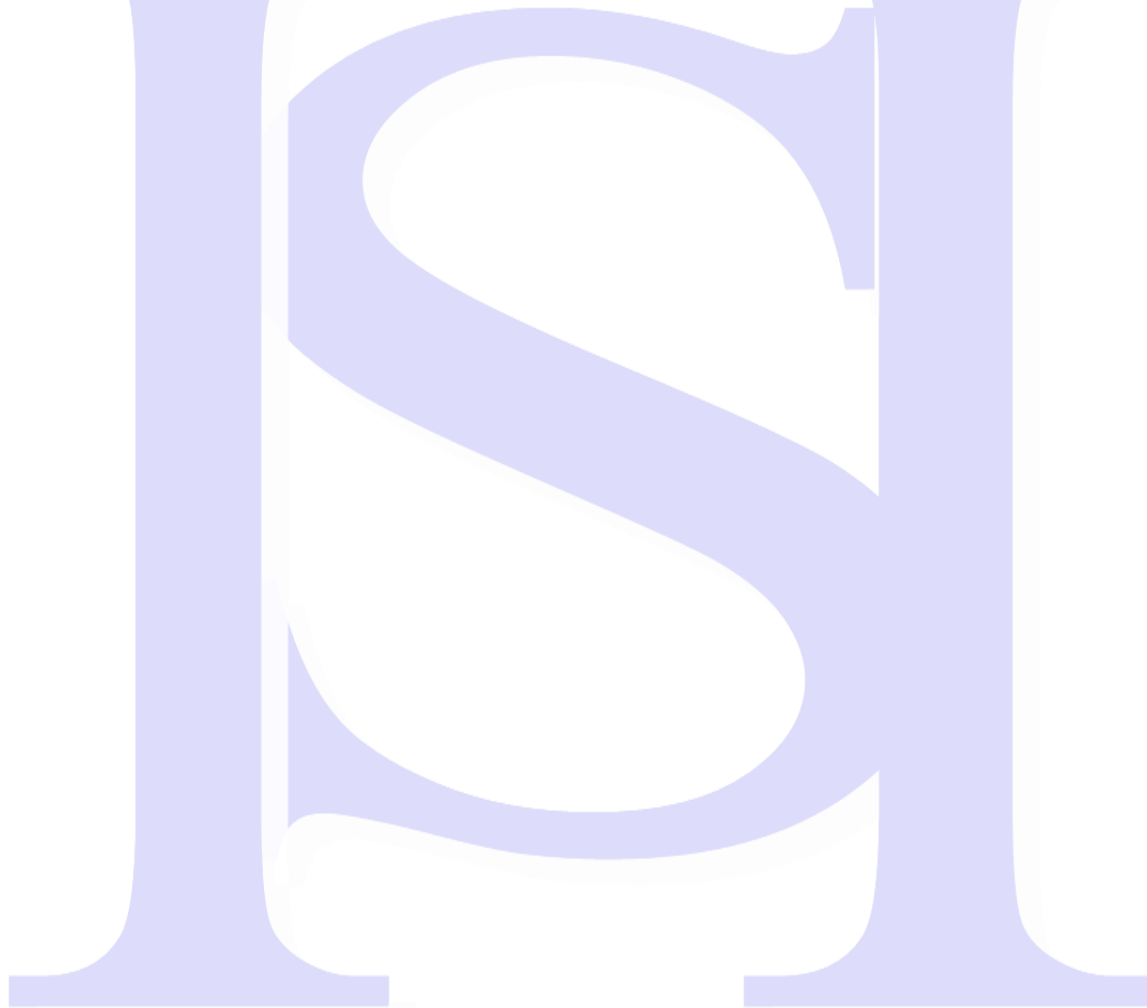



INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

1. Organización: Dispone de una dependencia responsable de un mantenimiento hospitalario:

Si JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO

2. Plan de mantenimiento: Verifique y escriba si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura: Si

2.2 Verifique y escriba si hay un plan de mantenimiento de la dotación: Si

3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento: Número de profesionales:

3.2 Número de técnicos: 1 técnico biomédico contratado AMC SUMINISTROS

3.3 Número de auxiliares: 1 bachiller técnico

4. Recurso financiero:

4.1 Indique como asignan y distribuyen los recursos para el mantenimiento hospitalario: Según contrato de mantenimiento y disposición del Médico Director

4.2 Recurso previsto para el mantenimiento hospitalario \$74.782 del presupuesto total

4.3 Recursos asignados en el presente año para el mantenimiento de la dotación \$ 33.300

4.4 Recursos asignados en el presente año para el mantenimiento de la infraestructura \$ 10.000



4.5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA \$ 16.482 Y OTROS \$ 15.000.

5. Gestión del servicio del mantenimiento: Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento: Las áreas que reciben mantenimiento son Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, Odontología, Sala de Esterilización, Sala de toma de citología, Sala de partos, Laboratorio, Vacunación, Cocina, Lavandería, Oficinas Administrativas

5.2 Describa quien y como se realizan las auditorías de los contratos de mantenimiento que celebran en la institución con empresas: Las interventorías son realizadas por el Gerente y la Jefe de Enfermería.

5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos: Se tiene institucionalizado el formato de eventos adversos de los cuales se realizan informes de intervención en caso de presentarse un evento.

5.4 Tienen registro de actividades del servicio de mantenimiento en la institución: Si, se tiene registro de todas las actividades realizadas en el servicio de mantenimiento tanto de las acciones correctivas como de las preventivas.

5.5 Lleva hoja de vida de los equipos: Si, se tienen hojas de vida de todos los equipos.

5.6 El servicio de mantenimiento tiene presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos.

-Realiza asesoramiento cuando se adquiere un equipo

-Se realiza inducción al personal nuevo

-Se realizan capacitaciones de manera periodica.

5.7 Conoce el Decreto 1769 de 1994 sobre mantenimiento hospitalario: el técnico de mantenimiento tiene conocimiento del Decreto, el cual será socializado con el personal de salud

5.8 Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación: Para el año 2022 se tiene un cronograma de capacitación



al personal de mantenimiento. AMC SUMINISTROS tiene el personal contratante debidamente actualizado.



Manizales, Enero de 2022

Señores:
HOSPITAL SAN JOSÉ
San José - Caldas.

Asunto: Capacitaciones Manejo de Tecnología Biomédica (tecnovigilancia).

Por medio de la presente damos a conocer las fechas para realización de las capacitaciones y sus temas para ser conocidas por los encargados de las diferentes áreas de la ESE Hospital.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

FECHA	TEMA	EQUIPOS
ABRIL	PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, MANEJO, CUIDADOS, EQUIPOS MÉDICOS	DESFIBRILADOR, MONITOR FETAL, BOMBA DE INFUSIÓN
AGOSTO	MANEJO, CUIDADOS, DE EQUIPOS MÉDICOS	ELECTROCARDIOGRAFO, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORA.
DICIEMBRE	MANEJO, CUIDADOS, DE EQUIPOS MÉDICOS	MONITOR FETAL, MONITOR DE SIGNOS VITALES, LAMPARA CALOR RADIANTE.

Cordialmente;

ANGELA MARÍA CÓRDOBA M.
Representante
legal.

CALLE 68 # 8-113 Manizales - Caldas
E-Mail amcm66@hotmail.com - cel. 3008726957



6. Inventarios:

- 6.1 Planos de las redes: Si, el inventario está completo
- 6.2 Equipos biomédicos: Si, el inventario está completo
- 6.3 Equipos industriales de uso hospitalario: Si, el inventario está completo
- 6.4 Planos de las áreas físicas: Si, el inventario está completo
- 6.5 Equipos de comunicaciones e informática: Si, el inventario está completo
- 6.6 Muebles de uso asistencial y administrativo: Si, el inventario está completo
- 6.7 Otros equipos y elementos no contemplados en los ítems: No

7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento

- 7.1 Tiene talleres para el mantenimiento: No se cuenta con un espacio exclusivo para el mantenimiento por falta de recursos para la infraestructura
- 7.2 Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de respuestas: Si, se cuenta con una oficina donde el técnico ingresa la información.

8 Dotación del servicio de mantenimiento:

- 8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos: No
- 8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos: Si, se cuenta con las herramientas necesarias para realizar las actividades
- 8.3 Dispone de manuales técnicos de los equipos: Se tienen los manuales de los equipos de la institución.



9. Verificación de mantenimiento de dotación

9.1 Mantenimiento de equipo biomédico	Pr.	Co.	Est.
9.1.1 Equipo de diagnóstico			
ELECTROCARDIOGRAFO 1	X		1
ELECTROCARDIOGRAFO 2	X		1
ELECTROCARDIOGRAFO 3		X	3
EQUIPO DE ORGANOS 1	X		1
EQUIPO DE ORGANOS 2	X		1
EQUIPO DE ORGANO 3	X		1
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL APS	X		1
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL UNIDAD MOVIL FOTON	X		1
EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO	X		1
FONENDOSCOPIO VACUNACION	X		1
FONENDOSCOPIO VACUNACION	X		1
FONENDOSCOPIO JEFE ENFERMERIA	X		1
FONENDOSCOPIO (AMBULANCIA) OVM289	X		1
FONENDOSCOPIO (URGENCIAS)	X		1



FONENDOSCOPIO (AMBULANCIA) OUC 765	X		1
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD MOVIL	X		1
FONENDOSCOPIO ADULTO UNIDAD MOVIL	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULTO1	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULTO 2	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULT 3		X	2
FONENDOSCOPIO APS	X		1
FONENDOSCOPIO APS ROSADO	X		1
FONENDOSCOPIO SALA DE PARTOS		X	2
FONENDO RAPPAPORT vacunación	X		1
FONENDO RAPPAPORT vacunación	X		1
FONENDO RAPPAPORT mantenimiento	X		1
FONENDO RAPPAPORT mantenimiento	X		1
FONEDOSCOPIO PEDIATRICO BK3004 MANTENIMIENTO	X		1
FONEDOSCOPIO PEDIATRICO BK3004 MANTENIMIENTO	X		1
FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC II MANTENIMIENTO		X	2
FONENDOSCOPIO GRIS LORD MANTENIMIENTO		X	2



GLUCOMETRO urgencias	X		1
GLUCOMETRO urgencias	X		1
MONITOR FETAL partos	X		1
MONITOR FETAL partos	X		1
MONITOR FETAL mantenimiento	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES mantenimiento		X	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES mantenimiento		X	2
MONITOR SIGNOS VITALES mantenimiento	X		1
MONITOR SIGNOS VITALES ambulancia ouc 765	X		1
MONITOR SIGNOS VITALES ambulancia ovm 289	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES urgencias	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES partos	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES trauma	X		1
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA (CONSULTA EXTERNA)	X		1
BALANZA PESA BEBE urgencias			
PESA DE PISO VACUNACION	X		1
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA VACUNACION	X		1
BALANZA DIGITAL MASA CORPORAL APS	X		1



BALANZA PESA BEBE APS	X		1
BALANZA PESA BEBE CONSULTA EX cónsultor 1	X		1
BALANZA PESA BEBE CONSULTA EX consultor 2	X		1
BALANZA PESA BEBE UNIDAD MOVIL	X		1
BALANZA DIGITAL MASA CORPORAL unidad movil	X		1
TENSIOMETRO MANUAL VACUNACION	X		2
TENSIOMETRO MANUAL VACUNACION		X	3
TENSIOMETRO PEDIATRICO VACUNACION			
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 1	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 1	X		1
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 2	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 2	X		1
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 3	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 3	X		1
TENSIOMETRO MANUAL (AMBULANCIA OUC765)	X		1
TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO(AMBULANCIA OUC765)	X		1
TENSIOMETRO MANUAL (AMBULANCIA OVM 289)	X		1



TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO (AMBULANCIA OVM 289)	X		1
TENSIOMETRO MANUAL (CONSULTA EXTERNA- URGENCIAS)	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO (CONSULTA EXTERNA-URGENCIAS)	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO PARTOS	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO PARTOS		X	2
TENSIOMETRO RODABLE (CONSULTORIO 2)	X		1
TENSIOMETRO APS PEDIATRICO	X		1
TENSIOMETRO ADULTO APS	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO UNIDAD MOVIL	X		1
TENSIOMETRO ADULTO UNIDAD MOVIL	X		1
VIDEOCOLPOSCOPIO	X		1
PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 1	X		1
PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 2	X		1
PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 3	X		1



PULSOXIMETRO CURVA URGENCIAS	X		1
PULSOXIMETRO CURVA MANTENIMIENTO	X		1
PULSOXIMETRO DE CURVA CONSULTA EXTERNA	X		2
OXIMETRO DE PULSO APS	X		1
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PARTOS	X		2
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO CONSULTA EXTERNA		X	3
TERMOMETROS INFRAROJOS CANTIDAD (22)	X		1
9.1.2 Equipo para tratamiento y mantenimiento de la vida			
AMALGAMADOR	X		1
ASPIRADOR PORTATIL (TRAUMA)	X		1
ASPIRADOR PORTATIL (PARTOS)	X		1
ASPIRADOR (AMBULANCIA OVM 289	X		1
ASPIRADOR (MANTENIMIENTO		X	2
ASPIRADOR (MANTENIMIENTO		X	2
ASPIRADOR AMBULANCIA OUC765	X		1
ASPIRADOR MANTENIMIENTO	X		1



COMPRESOR ODONTOLÓGICO	X		1
COMPRESOR ODONTOLÓGICO UNIDAD MOVIL	X		1
DEFIBRILADOR MINDRAY D-3	X		1
DEFIBRILADORWELCH ALLYN PIC 30 TRAUMA	X		2
DEFIBRILADOR TRAUMA	X		1
DEFIBRILADOR PARTOS	X		1
ELECTROCAUTERIO (PARTOS)	X		1
ESCALADOR		X	3
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA		X	3
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA	X		2
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA INALAMBRICA	X		1
LÁMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA UNIDAD MOVIL	X		1
LÁMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA ODONTOLOGIA	X		1
LARINGOSCOPIO (URGENCIAS)	X		1
LARINGOSCOPIO (TRAUMA)	X		1
MICROMOTOR CON CONTRAANGULO	X		1
MICROMOTOR CON CONTRA-ANGULO	X		1
MICROMOTOR CON CONTRA-ANGULO	X		1



NEBULIZADOR CONSULTORIO 1	X		1
NEBULIZADOR CONSULTOR 2	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
PIEZA DE ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
CAVITRON	X		1
INCUBADORA	X		1
SCALER ULTRASONIDO	X		1
SCALER ULTRASONIDO	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
9.1.3 Equipo para rehabilitación			
	Pr.	Co.	Est.



CONCENTRADOR DE OXIGENO (1 PUESTO)	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO(1 PUESTOS)	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
9.1.4 Equipo para prevención			
9.1.5 Equipo para análisis de laboratorio			
	Pr.	Co.	Est.
AGITADOR DE MAZINI	X		1
AGITADOR DE PIPETAS	X		1
EQUIPO DE HEMATOLOGIA RAITO	X		1
EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA REI	X		1
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA		X	3
BAÑO MARÍA	X		2
CENTRÍFUGA	X		2



CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	X		1
MICROSCOPIO	X		2
PIANO CUENTA CELULAS	X		2
PIPETA	X		1
PIPETA	X		1
INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO	X		1
PIPETA AUTOMATICA	X		1
9.2 Mantenimiento de equipo industrial de uso hospitalario			
9.2.1 Equipo para lavandería y cocina			
HIDROLAVADORA	X		1
LAVADORA	X		1
PURIFICADOR DE AGUA	X		1
AMBULANCIA	X		1
AMBULANCIA	X		1
UNIDAD MOVIL	X		1
9.2.2 Equipo para esterilización y autoclaves			
	Pr.	Co.	Est.



AUTOCLAVE ESTERILIZACION	X		1
AUTOCLAVE ESTERILIZACION	X		1
AUTOCLAVE UNIDAD MOVIL	X		1
9.2.3 Equipo de refrigeración y aire acondicionado			
REFRIGERADOR VACUNACIÓN	X		1
CONGELADOR VACUNACIÓN	X		1
NEVERA URGENCIAS	X		1
NEVERA FARMACIA	X		1
NEVERA LABORATORIO	X		1
NEVERA COCINA	X		1
NEVERA SANEAMIENTO	X		1
9.2.4 Calderas, bombas, plantas eléctricas			
PLANTA ELÉCTRICA HOSPITAL	X		1
PLANTA ELÉCTRICA UNIDAD MOVIL	X		1
PLANTA ELÉCTRICA HOSPITAL	X		1
9.2.5 Otros industriales de uso hospitalario			
	Pr.	Co.	Est.



LÁMPARA AUXILIAR (URGENCIAS)	X		1
LÁMPARA AUXILIAR UNIDAD MOVIL	X		1
LÁMPARA AUXILIAR (TRAUMA)	X		1
LÁMPARA CUELLO DE CISNE (PARTOS)	X		1
LÁMPARA CUELLO DE CISNE (CITOLOGIA)	X		1
CAMA PARA (PARTOS)	X		2
CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIA(TRAUMA)	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
NEGATOSCOPIO 1	X		2
NEGATOSCOPIO 2	X		2



REGULADOR DE OXIGENO AMBULANCIA OUC 765	X		1
REGULADOR DE OXIGENO AMBULANCIA OVM 289	X		1
REGULADOR DE OXIGENO TRAUMA	X		1
REGULADOR DE OXIGENO PARTOS	X		1
REGULADOR DE OXIGENO MANTENIMIENTO	X		1
SIERRA CORTAYESOS	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA 1	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA 2	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA UNIDAD MOVIL	X		1
LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	X		1
9.2.6 Equipos de seguridad			
	Pr.	Co.	Est.
BARANDAS DE SEGURIDAD BAÑOS	X		1
BARANDAS DE SEGURIDAD CAMAS	X		1
CINTAS ADHESIVAS	X		1
EXTINTORES	X		1



9.3 Mantenimiento de muebles para uso administrativo y para uso asistencial	Pr.	Co.	Est.
ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS (17)	X		2
ESCRITORIOS ASISTENCIALES (11)	X		2
CAMAS ASISTENCIALES (11)	X		1
CAMILLAS ASISTENCIALES (6)	X		2
CAMAS ADMINISTRATIVAS(3)	X		1
CAMILLA (1) TRAUMA	X		1
SILLAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES (20)	X		2
SILLAS RIMAX (23)	X		2
SILLAS PLEGABLE PLASTICAS 8 APS	X		1
SILLAS PLEGABLE PLASTICA 4 UNIDAD MOVIL	X		1
MESA PLEGABLE CANTIDAD (2) APS	X		1
MESA PLEGABLE UNIDAD MOVIL	X		1
CARPA PARA ATENCION EXTRAMURAL	X		1
CARPA PARA ATENCION EXTRAMURAL	X		1
PLEGABLE PARA PROYECTOR 1	X		1



9.4 Mantenimiento de equipos de comunicaciones de informática	Pr.	Co.	Est.
TODO EN UNO DELL TECLADO DELL MAUS DELL ADMON	X		1
PC-DE ESCRITORIO HP MODELO 24-DF0004 ADMON 2	X		1
CPU POWER MONITOR SAMSUNG TECLADO MAUSE ADMON 2	X		1
COMPUTADOR PORTATIL HP MANTENIMIENTO	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W LABORATORIO	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1101W ADMON 1	X		1
IMPRESORA EPSON L555 ADMON 2	X		1
SCANNER CANNON LIDE ADMON 1	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMAR TANK 530 ADMON 2	X		
IMPRESORA DESKJET 845	X		1
IMPRESORA HP LASER JETP PROM12 VACUNACION	X		1
TODO EN UNO HP (CONTROL INTERNO)	X		1
INPRESORA HP LASER JET P1102W CONTROL INTERNO	X		1



INPRESORA HP LASER JET P1102W FACTURACION	X		1
SERVIDOR CPU SUPER W RITEMASTER MONITOR LG FLATRON MAUS GENIUS TECLADO GENIUS FACTURA	X		1
FOTOCOPIADORA RICOH MP2851 FACTURACION	X		1
SCANNER CANNON LIDE FACTURACION	X		1
COMPUTADOR TODO EN UNO DELL FACTURA	X		1
COMPUTADOR ATX PROCESA MONITOR SAMSUNG FACTURACION	X		1
CPU JANUS MONITOR HP 7540 (ESTADI)	X		1
INPRESORA HP LASER JET P1102W ESTADI	X		1
CPU ARGON TECH MONITOR LENOVO THINKVISION TECLADO LENOVO MAUS GENIUS SANEA	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W CONSULTA EXTERNA	X		1
ESCANER HPDESKJET 3050 CONSULTA EXTERNA	X		1
CPU POWER MONITOR LENOVO TECLADO LENOVOMAUS LENOVO CONSULT 1	X		1



TUDO EN UNO LENOVO TECLADO LENOVO MAUS GENIUS ODONTOLOGIA	X		1
CPU HACER ASPIRE MONITOR HACER TECLADO MAUSE ODONTOLOGIA	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2110 ODONTOLO	X		1
PC-DE ESCRITORIO MODELO 24-DF0004 HP GERENTE	X		1
COMPUTADOR PC SMART AIO GOB21-A VACUNACION	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMAR TANK 530 PYP	X		1
PC INTEL CORE i3 monitor 19,5 POWER GROUP CONSULTA EXTERNA			
PC INTEL CORE i3 monitor 19,5 POWER GROUP CONSULTORIO 3	X		1
CPU POWER MONITOR LENOVO TECLADO MAUSE CONSULTORIO 2	X		1
10 Verificación del mantenimiento de la infraestructura	Pr.	Co.	Est.
10.1 Mantenimiento de edificios			
ÁREA CONSTRUIDA	X		2



10.2 Mantenimiento de instalaciones físicas	Pr.	Co.	Est.
TANQUE DE RESERVA DE AGUA	X		1
TECHOS	X		2
VENTANAS (49)	X		2
PUERTAS (64)	X		2
10.3 Mantenimiento de sistemas de redes			
	Pr.	Co.	Est.
REDES ELÉCTRICAS	X		2
REDES HIDRICAS	X		1
10.4 Mantenimiento de áreas adyacentes			
	Pr.	Co.	Est.
GUADAÑADORA	X		2
AREAS VERDES	X		2



INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 2022

ODONTOLOGIA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	DENSPLY	VARI MIX III	91852	1600-03-06
ODONTOLOGIA	CAVITRON	SCALER	ART-M1	C23222	16541
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	PUMA	PORTATIL	S/S	1600-9006
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	124458	1600-438
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	BEYOND	3000	112370	1600-0320
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA	VERDE			16640
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA	MORADA			16720
ODONTOLOGIA	RX PERIAPICAL	FIAD	S/M	1194	1600-0037
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	BELL-DENT	S/M	1141-80	1600-442
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	BELL-DENT	S/M	S/S	16542
ODONTOLOGIA	COMPRESOR	JHON TOMAS DOS MOTORES	N-A	2660CE32	16-529
ODONTOLOGIA	CAVITRON SCALER ULTRASONIDO	MAVERICK	ART		16639
ODONTOLOGIA	TERMOHIGROMETRO	N-A	N-A	N-A	16550
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		20101903	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		DBF80228	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		ABJ20096	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO			ABB20103-EBE22873	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO			ABE2D359	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO		NSK	0BD30730-0BD60050	
CONSULTA EXTERNA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
CONSULTA EXTERNA	PESA BEBE DIGITAL	HEALTH O METER	553		16543
CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	18218192758	
CONSULTORIO 1	PESA BEBE DIGITAL	BABY SCALE 354	3541317004		16708
CONSULTORIO 1	PULSOOXIMETRO				16712
CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16717
CONSULTORIO 1	FONENDOSCOPIO	LITTMAN NEGRO	GMD 20-T20	901039 REF	
CONSULTORIO 1	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	S/M	S/s	16589
CONSULTORIO 1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115190403	16580
CONSULTORIO 1	NEBULIZADOR	COMPREON	APEX	100100278	16582
CONSULTORIO 1	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042-M20A09560011	16693
CONSULTORIO 2	NEBULIZADOR	COMPREON	APEX	100100957	16583
CONSULTORIO 2	PULSOXIMETRO				16710
CONSULTORIO 2	PESA BEBE DIGITAL	BABY SCALE 354	3441317004		16709
CONSULTORIO 2	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042-M20A09560013	16694
CONSULTORIO 2	CONCENTRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115280012	16579
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	060410125800	
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK		
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16718
CONSULTORIO 2	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN		S/S	16590



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

CONSULTORIO 2	FONENDOSCOPIO	CLASSIC II	LITTMAN	I17C33698	
CONSULTORIO 3	FONENDOSCOPIO	LITTMAN VERDE	CLASSIC 11	19Q30734	
CONSULTORIO 3	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042- M20A09560012	16695
CONSULTORIO 3	PUSOXIMETRO				16713
CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK		
CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16719
CONSULTORIO 3	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN		S/S	16591
CITOLOGIAS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	S/S	1600-412
JEFE ENFERMERIA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN		110317194534	
JEFE ENFERMERIA	FONENDOSCOPIO	LITTMAN		I12B46002	
CONSULTORIO 1	TERMOMETRO INFRAROJO				
CONSULTORIO 2	TERMOMETRO INFRAROJO				
CONSULTORIO 3	TERMOMETRO INFRAROJO				
HOSPITALIZACION MUJERES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518341	16675
HOSPITALIZACION MUJERES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518351	16676
HOSPITALIZACION HOMBRES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518346	16677
HOSPITALIZACION HOMBRES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518355	16678
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518306	16679
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90 ^a	06071002013	16-410
HOSPITALIZACION	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034- M20A09230006	16704



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16685
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16686
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-687
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-688
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-689
TRAUMA Y URGENCIAS					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
TRAUMA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	S/M	S/S	16-505
TRAUMA	SUCCIONADOR SXT	STAGE	H003-C	20101570403007 2	16-716
TRAUMA	LAMPARA AUXILIAR	HANALUX	4 FOCOS	S/S	1600-0169
TRAUMA	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-08044867	16-692
TRAUMA	MONITOR DE SIGNOS	EDAN	IM8	360001- M21308650090	
TRAUMA	DEFIBRILADOR				435
TRAUMA	CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIA				16-498
URGENCIAS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	CE-0050		
URGENCIAS	TENSIOMETRO ADULTO	LOR GRIS			
URGENCIAS	PULSO OXIMETRO ADULTO				16-711
URGENCIAS	TENSIOMETRO ADULTO		S/S		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

URGENCIAS	PULSO OXIMETRO PEDIATRICO	821	S/s		16-523
URGENCIAS	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20908340003	16703
URGENCIAS	BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA	S/M	E004160033-E008160121		16-533
URGENCIAS	SIERRA CORTA YESOS	M-PAC	4183-106	38843	1600-183
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				16571
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				16570
URGENCIAS	TERMOMETRO INFRAROJO				
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	2020331010003746	16705
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	2020331010001616	16706
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	20200331010001610	16707
MANTENIMIENTO	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SMART SE-3	SE33A030346058ZB	1600-486
TRAUMA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	360250-M20A10220019	16696
URGENCIAS	FONENDOSCOPIO	LITMAN	CLASSIC II	I12C61229	
URGENCIAS	LAMPARA AUXILIAR	RITTER	S/M	S/S	
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW29001585	16-428
URGENCIAS	CONCENTRADOR DE O2	KAIYA	S/M	S/S	16-498
URGENCIAS	BOMBA DE INFUCION			9142012106014	
URGENCIAS	GLUCOMETRO	MATCH	OK-1B	DB1G182211	
URGENCIAS	GLUCOMETRO	MATCH	OK-1B	DB1G182213	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

ESTERILIZACION					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	STAR CLAVE		A18L-0100	
ESTERILIZACION	TERMOHIGROMETRO				16573
ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	AUTOMAT	5000	RS-2009DM-0003197	
PARTOS					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
PARTOS	MONITOR FETAL	CGENERAL MEDITECH	20171208	G6A171208	16578
PARTOS	VIDEO COLPOSCOPIO	GOLD WAY	SLC(2000)	22000511-010	16-0294
PARTOS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA	S/S	
PARTOS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	S/S	
PARTOS	INCUBADORA NEONATAL	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-920	A10BZA03005	16698
PARTOS	SUCCIONADOR	SXT5A	EMAC	L1418-065	16585
PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M18923530054	16588
PARTOS	SUCCIONADOR	SXT5A	EMAC	L1018-146	16586
PARTOS	LAMPARA DE CALOR RADIANTE		HKN-9010	22170801008	16-532
PARTOS	ELECTROCAUTERIO	ELLMAN	FFPF EMC	0002595	333
PARTOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	TYCOS	SUPER SHO RESISTANT	18010506074629	16584
PARTOS	INFANTOMETRO DIGITAL	DLM	DETECTO	C13020611	16-535
PARTOS	CAMA PARTOS	DOMETAL		135-22-0000057052	16-538
PARTOS	MESA EXAMEN PERIATICAL C/BALANZA TALLIMETRO	MIDMAR	640-0001-231	V1161119	16-536
PARTOS	DESFIBRILADOR				16691
PARTOS	TENSIOMETRO MANUAL	LORD AZUL			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

PARTOS	TERMOHIGROMETRO				16571
PARTOS	BOMBA DE INFUCION			9142012105988	
PARTOS	CONSETRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115280009	16581
LABORATORIO					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
LABORATORIO	AGITADOR DDE MAZZINI	LAB ROTATOR	DSR 2100V	S/S	16-261
LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS	S/M	S/M	S/S	1600-264
LABORATORIO	MICROSCOPIIO	OLYMPUS	CHS	3L0159	1600-030
LABORATORIO	CENTRIFUGA 24 TUBOS	INDULAB	O4-SPECIAL	15986	16690
LABORATORIO	BAÑO MARIA	MEMMERT	S/M	w 200	1600-0093
LABORATORIO	PIPETA	BOECO	100-1000µL	7031053	
LABORATORIO	PIPETA	HUMAN	5-50µL	06955	16-097
LABORATORIO	PIPETA	BRAND	5-50µL	01A8734	16-011
LABORATORIO	HORNO DE CULTIVOS	MEMMERT	VM-100	S/S	1600-0095
LABORATORIO	ANALIZADOR DE BIOQUIMICA	RAYTO	RT-1904C	401601042ET	16-487
LABORATORIO	ANALIZADOR DE QUIMICA				16697
LABORATORIO	INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO				16566
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO				
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO				
LABORATORIO	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	RAYTO	RT-7600S	821514026EQ	16-488
VACUNACION					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
VACUNACION	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	20094471122	
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				16604
VACUNACION	CONGELADOR	VESTFROST	MK804	20083381669	
VACUNACION	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

VACUNACION	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN			
VACUNACION	BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA	DETECTO		E004160042	16-534
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				
VACUNACION	FONENDO				
VACUNACION	FONENDO				
VACUNACION	PESA DE PISO				
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				
AMBULANCIA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
AMBULANCIA ouc765	TENSIOMETRO pediátrico	CERTIFIED	S/M	S/M	
AMBULANCIA ouc765	TENSIOMETRO adulto	TYCOS	S/M	3490	
AMBULANCIA ouc765	ASPIRADOR DE SECRECIONES	STAGE	H003-C	20101570403027 2	16715
AMBULANCIA OUC 765	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001- M21308650005	
AMBULANCIA OVM 289	ASPIRADOR DE SECRECIONES	S/M	S/M	S/S	
AMBULANCIA OVM 289	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	LIGHT WEIGHT	S/S	
AMBULANCIA OVM 289	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	PEDIATRICO	874269	
AMBULANCIA OVM 289	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	CE0297	SN140715195207	
AMBULANCIA OVM 289	DEFIBRILADOR	PRIMEDIC	M290	73675000317	
AMBULANCIA OVM289	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001- M21308660016	
AMBULANCIA OUC765	FONENDOSCOPIO				
FARMACIA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO				16551



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

FARMACIA	TERMOHIGROMETRO (MAXIMAS- MINIMAS)				
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO				16552
CUARTO DE OXIGENO					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
CUARTO DE OXIGENO	TERMOHIGROMETRO				16600
ESTADISTICA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
ESTADISTICA	TERMOHIGROMETRO				16553
KIT DE VIOLENCIA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
KIT VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	TERMOHIGROMETRO				166601
APS					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
APS	OXIMETRO DE PULSO 20115				16638
APS	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL				16592-16593
APS	EQUIPO DE ORGANO DE PASTA	GMD	2TF-100		16598
APS	BALANZA PESA BEBE DIGITAL				16595
APS	BALANSA DIGITAL MEDIDOR GRASA CORPORA	GMD	BD-1522		16594
APS	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD			16596
APS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD			16597
APS	Fonendo pediátrico	rosado			
UNIDAD MOVIL					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
UNIDAD MOVIL	AUTOCLAVE	DIGITAL TECHNOLOGY	DTGL	0413-1668	16672



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

UNIDAD MOVIL	UNIDAD ODONTOLOGICA	DRACO	APOLO		16670
UNIDAD MOVIL	AMALGAMADOR	D-650	TPC	1130870	16674
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE MANO	DTM		201909161032	
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE MANO	DTM		201909161044	
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE BAJA O MICROMOTOR	DTM		0190410154	
UNIDAD MOVIL	LAMPARA DE FOTOCURADO	DTM	LY-A180	20181230699	16673
UNIDAD MOVIL	TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	DK2001	836572	16668
UNIDAD MOVIL	FONENDO PEDIATRICO	BOKANG			16667
UNIDAD MOVIL	TENSIOMETRO ADULTO	FAV-A01			16666
UNIDAD MOVIL	FONENDO PEDIATRICO	FAV-A01			16665
UNIDAD MOVIL	PESA BEBE	HEATHO OMETER	386KGS-01	3860010769	16662
UNIDAD MOVIL	PESA DIGITAL ADULTO	TRANSTEK	GBS-903		16664
UNIDAD MOVIL	EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2050-01		16663
UNIDAD MOVIL	LAMPARA DE CUELLO DE CISNE				16661
MANTENIMIENTO					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
MANTENIMIENTO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SUCTION UNITED	7E-D	S/S	16-035
MANTENIMIENTO	CENTRIFUGA	SUS	CM-120	089	1600-263
MANTENIMIENTO	DEFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	87482	1600-435
MANTENIMIENTO	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-101	080.19068	16434
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16699
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16700
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16701
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16702
MANTENIMIENTO	FONENDO	LITTMANN		18U28978	
MANTENIMIENTO	PULSOXIMETRO				16714
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		115033	16649
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		01582231	16645
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0152333	16646
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0164194	16647



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0152334	16648
MANTENIMIENTO	TERMOMETRO INFRAROJO				
MANTENIMIENTO	PULSO OXIMETRO PEDIATRICO	821	S/S		16-524
MANTENIMIENTO	DOPPLER FETAL		SONOTRAX II pro		16540
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC75-2409	1600-0299
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069- M18923530057	16587
MANTENIMIENTO	BOMBA DE INFUCION				
MANTENIMIENTO	BOMBA DE INFUCION				
MANTENIMIENTO	FONENDO PEDIATRICO				
MANTENIMIENTO	FONENDO PEDIATRICO	BOKAN	BK30021		
MANTENIMIENTO	TEMOMETROS INFRAROJOS CANTIDAD(18)		FI01		
MANTENIMIENTO	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCHALLYN	TYCOS	111007164603	



INVENTARIO MUEBLES Y ENSERES

TIPO	MARCA	UBICACION
Silla CON RODACHINES	NEGRA	ADMINISTRACION
mesas	MADERA	ADMINISTRACION
ARMARIO PUERTAS DOS	METALICO	ADMINISTRACION
Silla CON RODACHINES	NEGRA	ADMINISTRACION
silla 1	RIMAX	ADMINISTRACION
Vitrina metálica	2 vidrios 1 entrepaño	JEFE ENFERMERIA
Silla madera	CORDOBAN NEGRO	ADMINISTRACION
Escritorio en L madera aglomerada 150cmx75 cm	Escritorio	ADMINISTRACION
mesa Modulo Auxiliar	MESA	ADMINISTRACION
Mesa computador	MESA	ADMINISTRACION
Estante metálico. 11	METALICOS	ARCHIVO
Silla plástica s/b	RIMAX	COCINA
Silla plástica s/b	RIMAX	COCINA
Silla pastica c/b.	RIMAX	COCINA
Mesa plástica redonda	RIMAX	COCINA
Escritorio Subgerente tipo	METALICO	CONSULTA EXTERNA
SILLA Plástica	RIMAX	CONSULTA EXTERNA



SILLA Plástica	RIMAX	CONSULTA EXTERNA
Silla ergonómica rodachines	negra	CONSULTORIO # 1
Silla Plástica	RIMAX	CONSULTORIO # 1
Escritorio madera,	MADERA	CONSULTORIO # 1
nochero metálica	METALICO	CONSULTORIO # 1
Silla plástica	RIMAX	CONSULTORIO # 2
Silla ergonómica rodachines	negra	CONSULTORIO # 2
Nochero	METALICO	CONSULTORIO # 2
Escritorio madera	MADERA	CONSULTORIO # 2
Sillas Plástica	RIMAX	CONSULTORIO # 3
Sillas ergonómica rodachines	negra	CONSULTORIO # 3
Nochero metálico	METALICO	CONSULTORIO # 3
Escritorio cajón	MADERA	CONSULTORIO # 3
Cama de 1.40	MADERA ANDALUZ	CUARTO HOSPITAL
Nochero	MADERA BOSTON	CUARTO HOSPITAL
Silla Plástica	RIMAX	DIRECCION
Silla ergonómica rodachines	blanca	DIRECCION
Escritorio madera	MADERA	MANTENIMIENTO
Escritorio en L metal y vidrio	vidrio	DIRECTOR
Silla plástica	RIMAX	DIRECTOR



Camarote	TUBULAR MEMPHIS	CUARTO AUXILIARES ENFERMERAS
Silla pre escritorio	PRESIDENTE	ESTADISTICA
escritorio	MADERA	ESTADISTICA
Estantes 4	MADERA	ESTADISTICA
Estante 4	MADERA	ESTADISTICA
Escalerilla tubular	MTALICA	ESTADISTICA
Escalerilla Tubular	METALICAS	ESTADISTICA
Armario	METALICO	ESTADISTICA
Vitrina	METALICA	ESTADISTICA
Vitrina	METALICA	ESTADISTICA
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FACTURACION
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FACTURACION
Repisa de pared	MADERA	FACTURACION
Mesa	MADERA	FACTURACION
Mesa	MADERA	FACTURACION
Escritorio	MADERA	FACTURACION
Escritorio	MADERA	FACTURACION
Armario	METALICO	FACTURACION
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FARMACIA
escalerilla	RIMAX	FARMACIA
escalerilla	METALICA	FARMACIA



Mesa	MADERA	FARMACIA
Estante	METALICO	FARMACIA
Estante 5 entrepaños	MADERA	FARMACIA
Estante 5 entrepaños	MADERA	FARMACIA
Cama electrica 2	electrica	HOSPITALIZACION OMBRES
SILLA	RIMAX	HOSPITALIZACION HOMBRES
NOCHERO	METALICO	HOSPITALIZACION HOMBRES
Cama electrica	ELECTRICA	HOSPITALIZACION MUJERES
SILLA	RIMAX	HOSPITALIZACION MUJERES
NOCHERO	METALICA	HOSPITALIZACION MUJERES
BIOMBO	MADERA	HOSPITALIZACION MUJERES
MESA COMPUTADOR	MADERA	JEFE ENFERMERIA
SILLA RIMAX	RIMAX	JEFE ENFERMERIA
Silla	RIMAX	JEFE DE ENFERMERIA
Estante 4	METALICO	JEFE DE ENFERMERIA
Cajón	MADERA	BACTERIOLOGIA
Butaca	METALICO	BACTERIOLOGIA
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	BACTERIOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	BACTERIOLOGIA



Archivador	METALICO	BACTERIOLOGIA
armario	METALICO	MANTENIMIENTO
MESA COMPUTADOR	MADERA	MANTENIMIENTO
Silla ergonomica rodachines	negra	ODONTOLOGIA
SILLA ergonomica rodachines	negra	ODONTOLOGIA
Mesa metálica de noche	METALICO	ODONTOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	ODONTOLOGIA
Escritorio	METALICO	ODONTOLOGIA
Caja plástica	RIMAX	ODONTOLOGIA
Archivador	METALICO	ODONTOLOGIA
Cama electrica	electrica	PEDIATRIA
Silla	Rimax	PEDIATRIA
Silla ergonomica rodachines	Negra	PYP
Mesa COMPUTADOR	MADERA	PYP
Escritorio	METALICO	PYP
Silla Azul 3puestos 1	METALICA	SALA ESPERA
Tándem 4 puestos. 2	METALICAS	SALA ESPERA
Tándem Largo azul 1	METALICAS	SALA ESPERA
Silla	RIMAX	SANEAMIENTO
Silla ergonomica rodachines	Negra	SANEAMIENTO
Escritorio computador	METALICO	SANEAMIENTO



Archivador	METALICO	SANEAMIENTO
Vitrina	Metálica	URGENCIAS
Vitrina	METALICA	URGENCIAS
gaveta	PLASTICA	URGENCIAS
Vitrina	METALICA	VACUNACION
mesa café	MADERA	VACUNACION
Silla ergonómica rodachines	negra	VACUNACION
Estante 6 puestos	METALICA	VACUNACION
Archivador 4 cajones	Metálico	vacunación
Archivador 4 cajones	Metálico	Vacunación
Escritorio computador	MADERA	VACUNACION
SILLA	RIMAX	PSICOLOGIA
SILLA	RIMAX	PSICOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	PSICOLOGIA
VITRINA	METALICA	JEFE ENFERMERIA
SILLAS PLEGABLES 8	PLASTICAS	APS
SILLA PLEGABLES 4	PLASTICAS	UNIDAD MOVIL
MESA PLEGABLE	PLASTICA	UNIDAD MOVIL
MESA PLEGABLE 2	PLASTICA	APS
PLEGABLE PARA PROYECTOR	PASTA	APS
BIOMBO DOS CUERPOS APS	METALICO AZUL	APS
CAJONERO POR 3	PLASTICOS	CYD



ESCRITORIO INFANTIL	PLASTICO	CYD
---------------------	----------	-----

INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO
computador todo en uno Lenovo serie:CS00976461	ADMINISTRACION	16507
Computador Dell todo en uno doble canal teclado y mouse serie HO9OPV1	ODONTOLOGIA	378
Computador portátil HP	JEFE MANTENIMIENTO DE	483
Computo torre atx procesa monitor Samsung ZZD3H44LG900002Y	ADMINISTRACION	16519
IMPRESORA HP LASER JETP1102W SERIE VND3531647	LABORATORIO	16514
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMAR TANK 530	ADMINISTRACION	
PC DE ESCRITORIO 24-DF0004	ADMINISTRACION	
IMPRESORA HP LASER JETP1101W SERIE VND3R76632	ADMINISTRACION	16510
IMPRESORA EPSON L555 SERIE 54VY053O45 MODELO C463B	ADMINISTRACION	16508
SCANNER CANNON LIDE	ADMINISTRACION	16530
IMPRESORA HP LASER JET P1102	JEFE ENFERMERIA	16-452
pc hp pantalla ancha todo en uno	JEFE ENFERMERIA	16619
COMPUTADOR TODO EN UNO HP OMNI 100 PC	LABORATORIO	16-426



impresora hp laser jet pro m102w	FARMACIA	16-620
Impresora hp LASERJET PROM12W BLANCA	VACUNACION	16-531
COMPUTADOR TDO EN UNO DELL S/R J090P DOBLE CANAL	FACTURACION	16-210
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MP2851	FACTURACION	16541
Computador torre ATX procesa monitor Samsung TECLADO MAUSE	FACTURACION	16-520
Servidor CPU SUPER WRITEMASTER SERIE AJ2002955000017 MONITOR LG FLATRON E1942	FACTURACION	16-167
SMART UPS RT 5000	FACTURACION	16-223
SCANNER CANNON LIDE	PROMOCION PREVENCION	Y 16529
Computador TODO EN UNO HP TTOUCHSMART 310 PC SERIAL MXX129033R MODELO 310121ULA	PROMOCION PREVENCION	Y 16-416
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMAR TANK 530	PROMOCION PREVENCION	Y
Impresora HP laser jet p1102w VND3M19182	FACTURACION	16-417
CPU LG ARGON TECH MONITOR LENOVO THINKVISION	SANEAMIENTO AMBIENTAL	16-374-16--375
ESCANER HP DESKJET 3050 SERIE CN1493D3N2	SANEAMIENTO AMBIENTAL	16-430
Computador torre ATX procesa monitor Samsung	CONSULTA EXTERNA	16522
scanner hp desjet3051 CN149393HN	CONSULTA EXTERNA	



Impresora hp LASERJET p1102	CONSULTA EXTERNA	
CPU POWER MONITOR ACER AX30 MDG300 2GB	CONSUTORIO 1	16-521
PC INTEL CORE i3 monitor LG 19,5	CONSULTORIO 2	16617
CPU LG ARGOM TECH SERIE G18RGAD22H16G1851 MONITOR ACER P186V SERIE ETLPZ0W0031380E	CONSULTORIO 3	16-448
CPU HACER ASPIRE MODELO AX1430 MONITOR HACER MODELO P186HV SERIE ETLP20W0031380E6674322	FARMACIA	16-336 16-314
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2110	ODONTOLOGIA	
CPU HACER ASPIRE MODELO AX1430 MONITOR ACERP186HV SERIE ETLPZ0W0031381114F4322	ODONTOLOGIA	16-441 16-443
COMPUTADOR PCSMART AIO GOB21-A SERIAL P2957011500574	VACUNACION	16517
CPU POWER SERIE C100IMP6315RXE MONITOR LENOVO SERIE V1NK282	PARTOS	16506-16181
PC INTEL CORE i3 monitor LG 19,5	Urgencias	16618



Monitor HACER P186HV teclado y mouse	ESTADISTICA	16-461
impresora hp laser jet pro m102w	ESTADISTICA	16622
PC DE ESCRITORIO MODELO 24-DF0004	GERENTE	
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	VACUNACIÓN	16627
COMPUTADOR PORTATIL DE MESA HP LAPTOP BLANCO	PSICOLOGIA	16604
VIDEO BEAM EPSON PL S39	APS	16606



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5

Cristian Camilo G.

CRISTIAN CAMILO GALLEGO
GERENTE

Juan David Londoño Q.

JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO
JEFE DE MANTENIMIENTO



ANEXOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS, ESE
NIT 810.001.159-5

ANEXO 4

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS ESE, CRISTIAN CAMILO GALLEGU AGUIRRE,

CERTIFICA:


PUBLICO. X
PRIVADO


Que durante la vigencia fiscal comprendido entre el (1) de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 la asignación y ejecución de recursos correspondientes a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación es la que se detalla a continuación.


CONCEPTO	RECURSOS INICIA (1)	(%)	RECURSOS DEFINI (2)	(%)	EJECUCIO A DICIEMBRE	(%)	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	SALDO A EJECUTAR A 31 DICIEMBRE
1 Total de Ingresos	1495623	100	1495623	100%	0	%	0	1495623
2 Valor de los Contratos con la Nación y con las entidades Temporales (3)								
3 Recursos asignados a								
3 1 Mantenimiento de la infraestructura	10000	100%	10000	100%	0	%	0	10000
Edificios								
Instalaciones Físicas	10000		10000		0		0	
Sistema de Redes								
Áreas Adyacentes								
Otros								
3 2 Mantenimiento de la Dotación	33300	100%	33300	100%	0	%	0	33300
Equipo Biomedico	33300		33300		0		0	0
Imágenes Diagnósticas								
Laboratorio								
Terapia Tratamiento y rehabilitación								
Otros de Diagnóstico								
De mantenimiento de la vida UCI								
Otros								
3 2 1 Equipo Industrial de uso Hospitalario	31482	100%	31482	100%	0	%	0	31482
Plantas eléctricas								
Equipos de Lavandera y cocina								
Bombas de Agua Calderas								
Autoclaves y esterilización								
Refrigeración y aire acondicionado								
Relacionados con equipos de apoyo								
Otros	15000	100	15000	100%	0	%	0	15000
Muebles de uso Administrativo y Asistencial								
Equipo de Comunicaciones e informática	16482		16482	100%	0	%	0	16482
Total	74782		74782		0		0	74782

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y A LA DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS a los 7 días del mes de Enero de 2022.

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	DEFINITIVO
VALOR MANTENIMIENTO FUNCIONAM	15 000 000		15 000 000
VLARD MANTENIMIENTO EN INVERSI	59 782 000		59 782 000
TOTAL MANTENIMIENTO DEL 5% DEL I	74 782 000		74 782 000


 REPRESENTANTE LEGAL


 JEFE MANTENIMIENTO


 CONTADOR

CRA 2 NRO 5-14
 DIRECCION
 CALDAS
 DEPARTAMENTO

8606504
 TELEFONO
 SAN JOSE
 MUNICIPIO

8608568
 FAX



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ
SAN JOSE CALDAS E.S.E
NIT: 810.001.159-5



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS E.S.E.
NIT 810.001.159-5

EL GERENTE Y EL CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN

Que el Hospital Departamental San José de San José Caldas, ESE, Nit 810.001.159-5, para la vigencia fiscal 2022 se tiene Presupuestado en el rubro de Mantenimiento tanto en Funcionamiento y en Inversión la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (\$74.782.000) M.CTE

Dado en San José Caldas, a los 7 días del mes de Enero de 2022.


CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE


SANDRA MORALES JARAMILLO
CONTADORA

"NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR"